



Manual de usuario

EIO Push Chair



ATENCIÓN: Para evitar graves lesiones por caídas o resbalones use siempre el arnés de seguridad. Nunca deje al niño desatendido.
IMPORTANTE: mantenga estas intrucciones para futuras consultas.
La seguridad del niño es su responsabilidad. Este vehículo es adecuado solo para un niño


IMPORTANTE

- LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR LA SILLA Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
- ACTIVE AMBOS FRENOS CUANDO APARQUE LA SILLA.
- LA SEGURIDAD DE SU NIÑO PUEDE VERSE AFECTADA SI USTED NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN GENERAL Y SEGURIDAD

- Siga estas intrucciones cuidadosamente. Un uso incorrecto puede causar daños en la silla de paseo
- Este product ha sido diseñado para llevar un peso máximo de 40kg.
- El niño debe ir sujeto por el arnés todo el tiempo y no debe dejarle desatendido.
- **IMPORTANTE:** Es importante para la seguridad de su hijo que el arnés esté correctamente adaptado y ajustado. Si no se ajusta de acuerdo con las instrucciones, se pondrá en peligro la estabilidad de la silla de paseo.
- El arnés y el cinturón no deben ser un sustituto de la supervision de un adulto.
- El niño debe estar suelto de los arneses mientras se realizan los ajustes.
- **IMPORTANTE- PELIGRO:** Es importante que se tenga cuidado en asegurar que el niño se ecuentra libre de la silla de paseo durante el plegado y desplegado. Es posible pillarse y cortarse durante estas situaciones.
- No suba a más de un niño, bienes o accesorios en la silla de paseo a excepción de las permitidas en este manual. Puede provocar que la silla de paseo pierda estabilidad o colocar demasiado peso que pueda llevar a la rotura de la silla..
- La sobrecarga, el plegado incorrecto y el uso de accesorios, por ejemplo, asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas para la lluvia, plataformas, etc., distintos de los aprobados por el fabricante puede dañar o romper la silla.
- Cualquier daño causado por el uso de otro accesorio que no haya sido suministrado por el fabricante no sera cubierto por los terminus de la garantía.
- Nunca deje al niño en la silla cuando suban o bajen escaleras o escaleras mecánicas, o cuando viajen en otras formas de transporte.
- La silla de paseo siempre debe abrir y plegar fácilmente. No lo fuerce. Puede que sea necesario volver a leer las instrucciones.
- Por zonas de curvas y superficies irregulares tenga cuidado. Los impactos repetidos puede causar daños en la silla de paseo.
- Nunca permita que el niño se ponga de pie sobre el reposapiés.
- No deje la silla de paseo expuesta a una fuente de calor, es decir, a un radiador o bajo la luz solar directa..
- No coloque objetos en la parte superior de la capota, ya que puede causar daños en el dosel.

PARTES

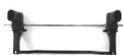

EJE POSTERIOR



REPOSAPIÉS



RUEDAS DELANTERAS



RUEDAS TRASERAS



CAPOTA



ALMOHADILLAS
LATERALES



ASIENTO DE TELA



CHASIS Y CESTA



NOTA: ESTA PARTE ES SOLO MATERIAL DE EMBALAJE

1. CHASIS

Abra el chasis en posición vertical. Cuando se activan el seguro principal y el secundario escuchará un "click".

NOTA: La bolsa con inserciones rígidas puede ser extraído de la cesta.



2. EJE POSTERIOR

Empuje las pestañas del bastidor trasero en el eje trasero.

Cuando se activa el bloqueo, se escuchará un "click".



3. RUEDAS TRASERAS

Coloque la rueda trasera en el eje posterior izquierdo.

Repita con el derecho. Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".



4. RUEDAS DELANTERAS

Coloque la rueda delantera izquierda encajandola hacia arriba en el bastidor delantero. Repita con la derecha.

Lubricar con moderación con teflón o recubrimiento de silicona. Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".



5. REPOSAPIÉS

Coloque el reposapiés de forma que quede hacia arriba. Empuje las pestañas de los tubos del reposapiés derecho e izquierdo al mismo tiempo.

Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".



6. ASIENTO DE TELA

Fije el doble automático en el tubo del chasis (en los dos lados, derecha e izquierda).
Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".



A. ASIENTO DE TELA

Tiene correas de soporte con un automático para cada pata trasera.
Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".



B. DOS CORREAS DIJADAS AL CHASIS POR DEBAJO DEL ASIENTO


Hay una correa frontal (por encima del tornillo, por debajo del ajuste de los reposapiés).

CORREA POSTERIOR



C. IMPORTANTE: CORREAS DE LA BASE DEL ASIENTO CON HEBILLA

Pasar la correa a través de la hebilla, luego hacia abajo a través de la parte superior.

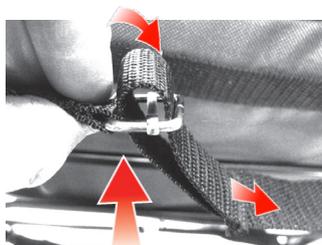


D. CORREAS DE LA BASE DEL ASIENTO CON HEBILLA

La parte de la correa que sobra colocar debajo del asiento entre la correa ya fijada y la parte inferior del asiento. No apriete demasiado.



E. REPOSAPIÉS CON AUTOMÁTICOS X2

En la tela del reposapiés hay dos automáticos para fijar la tensión del reposapiés.
Cuando se active el bloqueo se escuchará un “click”.

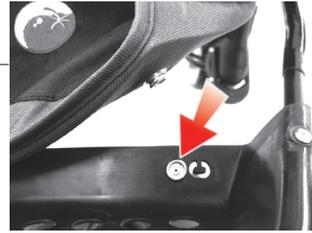

F. REPOSAPIÉS CON VELCRO

Hay dos tiras de Velcro para colocar alrededor del chasis. Repetir con la derecha.




G. CUBIERTAS LATERALES

Coloque la tela sobre el seguro principal y fíjelo con el Velcro.
Repita con el derecho.




7. CAPOTA

- (A) Deslice el clip de la capota hacia abajo para unirlo con el chasis. No forzar. Asegurese que el clip esté libre de ninguna obstrucción con la tela. Repita con el izquierdo.
Cuando se active el bloqueo se escuchará un “click”
- (B) Para quitar la capote presiones hacia abajo el clip mientras tira hacia arriba de ella

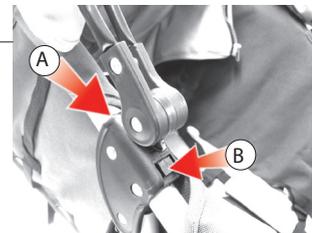

AUTOMATICOS Y CREMALLERA DE LA CAPOTA

Para mayor estabilidad la capote tiene automáticos y cremalleras laterales.
La cremallera y el automatic estan posicionados justo debajo del manillar. Ajuste el botón. Repita con el izquierdo.
NOTA: Usted puede quitar la mitad de la capote trasera desabrochando la cremallera de la costura central.

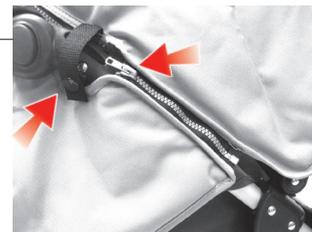

8. ALMOHADILLAS LATERALES X4

Introducir las dos correas de velcro a través de ranuras situadas en los bordes y la superficie posterior del asiento.



CORREAS LATERALES DE VELCRO

Tire de cintas de velcro a través de la parte exterior del asiento (o el dorso). Luego colóquelas alrededor del chasis y fíjelas.

Repita este procedimiento para todas las correas.





9. CINTURÓN / ARNÉS DE HOMBROS/ FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE PIE

ATENCIÓN: PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O RESBALONES, UTILICE SIEMPRE LA SUJECCIÓN DE LA INGLE JUNTO CON EL CINTURÓN Y EL ARNÉS DE HOMBROS.

9.A ALTURA AJUSTABLE DEL ARNÉS DE HOMBROS


Suelte le clip del acolchado que va sobre el pecho, a continuación introducir los tirantes por las aberturas del respaldo y ajustar según la altura de los hombros. Vuelva a abrochar el clip a la almohadilla del pecho.

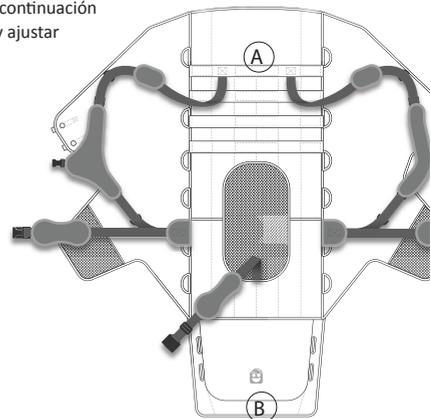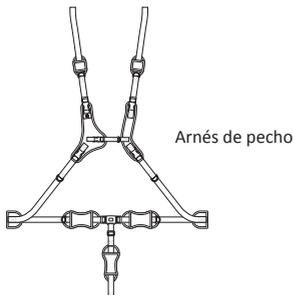

9.B REPOSAPIES AJUSTABLE EN ALTURA

Introduzca las tiras a través de la tela del reposapiés y fíjela rodeando del chasis. Ajuste ñips clips alrededor de la parte trasera y apriete.

Ver instalado en la página siguiente.

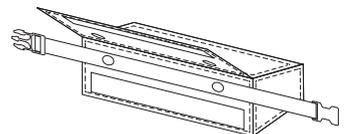

9.B REPOSAPIES AJUSTABLE EN ALTURA

Se muestran los reposapiés instalados.

NOTA: El cierre puede ser ajustado más arriba o más bajo. Coloque las tiras alrededor de la parte externa del chasis.



BACK REST SURFACE

11. FRENO

Usando el pie, empuje hacia arriba para soltarlo y hacia abajo para frenarlo..



12. RECLINACIÓN DEL RESPALDO

SUBIR: Empuje hacia arriba la hebilla de reclinación y tire hacia abajo de las tiras.

BAJAR: Presione el botón que contiene una fleche en la hebilla, y tire de la hebilla hacia abajo



13. ÁNGULO DEL REPOSAPIES

Para ajustar el ángulo del reposapiés, presione el botón en los dos lados de forma simultánea.

Debe escucharse un "click" que indica que se ha activado el bloqueo.



14. BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para ajustar la dirección de las ruedas delanteras, levantar la pestaña hacia arriba para desbloquear, y presionar hacia abajo para bloquear. Repetir en la izquierda.

Cuando se active el bloqueo se escuchará un "click".
NOTA: Para poder bloquearlas, es necesario que las ruedas delanteras estén orientadas hacia delante.



15. PLEGADO

- (A) Respaldo totalmente reclinado
- (B) Desenganchar la capota del asiento trasero
- (C) Coloque el manillar en posición vertical.
- (D) Desbloquear las ruedas delanteras giratorias (ambos lados deben estar mirando al frente)
- (E) Colocar el reposapiés totalmente plegado
- (F) Coloquese de pie detrás de la silla, libere los seguros principales (ambos lados) y el seguro secundario (lado derecho).



PLEGADO

- (A) Los seguros principales se desactivarán.
- (B) Empuje hacia abajo el manillar de la silla EIO.



PLEGADO

- (A) Asegure el clip de cierre.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Esta silla de paseo requiere un mantenimiento regular por el uso. Revisar regularmente todos los remaches y dispositivos de conexión estén tensos y ajustados. Inspeccionar todos los frenos, las ruedas y los neumáticos y reemplazar o reparar si fuera necesario. Compruebe todos los dispositivos de seguridad para su correcto funcionamiento, en particular, los cierres. Estos deben tener libertad de movimiento en todo momento. No continúe usando el producto si detecta que hay un problema en la solidez de la estructura.

- Recomendamos una revisión cada año.
- Si las ruedas chirrían, engrase ligeramente con teflón o recubrimiento de silicona. No utilice productos de base aceitosa o grasa, ya que esto atrae la suciedad, lo que dificultará el movimiento.
- Sólo deben usarse las piezas de repuesto del fabricante. Puede ser peligroso usar piezas no suministradas por el fabricante.

LIMPIEZA

- Limpie el marco o la estructura con un paño húmedo y un detergente suave y seque completamente.
- Si partes del chasis de la silla han estado expuestas a agua salada, recomendamos enjuagarlas con agua fresca (del grifo) tan pronto como sea posible.
- La capota puede limpiarse frotándola ligeramente con un paño húmedo y un detergente suave. La funda de asiento, el reposacabezas, los cojines y las almohadillas laterales del arnés se pueden lavar. Secar completamente antes de volver a usarla.
- No pliegue ni almacene el producto mientras este húmedo y nunca lo guarde en un entorno húmedo, ya que esto puede causar formación de moho.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño de cualquiera de sus productos o parte de ellos para continuar con el programa de mejoras de diseño.

