



Instrukcja obsługi dla wózka

EIO Special Tomato





OSTRZEŻENIE: NALEŻY ZACHOWAĆ WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKAĆ POWAŻNYCH OBRAŹEN DZIECKA BĘDĄCYCH NASTĘPSTWEM UPADKU LUB WYSUNIĘCIA. UZYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNEGO SIEDZISKA I ZAPINAĆ DZIECKO PASAMI. NIE POZOSTAWIAĆ DZIECKA BEZ OPIEKI. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECKA ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE. WOZEK PRZEZNACZONY JEST DLA JEDNEGO DZIECKA.

OGÓLNE INFORMACJE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji. Użytkowanie wózka niezgodnie z przeznaczeniem może powodować uszkodzenie wózka oraz zagrażać bezpieczeństwu użytkownika
- Wózek przeznaczony jest dla dzieci o wadze do 40 kg.
- Dzieci przebywające w wózku powinny pozostawać pod stałą opieką i kontrolą opiekunów
- UWAGA - bardzo ważne jest prawidłowe zamocowanie pasa bezpieczeństwa oraz jego odpowiednie dopasowanie do użytkownika. Montaż oraz ustawienia pasa niezgodne z instrukcją zagraża stabilności wózka
- System siedziska oraz pasy bezpieczeństwa nie zastępują właściwego nadzoru opiekuna
- Podczas korekty ustawień ruchomych części wózka, dziecko nie powinno znajdować się w wózku.
- Uwaga: Należy też zwrócić uwagę, żeby podczas składania i rozkładania wózka, dzieci znajdowały się z dala od wózka. Należy wtedy zachować ostrożność - ryzyko odniesienia obrażeń przycięcia i zgniecenia części ciała
- Nie należy wykorzystywać wózka do transportu więcej niż jednego dziecka, zakupów lub akcesoriów.
- Może to powodować niestabilność wózka oraz miejscowe naprężenia ramy, co może doprowadzić do uszkodzenia wózka
- Przeciążenia, nieprawidłowe składanie wózka oraz wykorzystywanie akcesoriów (fotelik dziecięcy, haki, torby, pokrowce przeciwdeszczowe) innych niż zatwierdzone przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia wózka
- Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania wózka niezgodnie z przeznaczeniem oraz wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów nie są objęte warunkami gwarancji
- Nigdy nie zostawiać dziecka w wózku podczas wnoszenia - znoszenia wózka po schodach, podczas jazdy schodami ruchomymi i innymi środkami transportu
- Wózek powinien dać się zawsze łatwo składać i rozkładać. W przypadku problemów ze złożeniem wózka zapoznać się ponownie z instrukcją lub skontaktować się z punktem serwisowym
- Ostrożnie pokonywać krawężniki oraz nierówności. Ekstremalne użytkowanie wózka może powodować jego uszkodzenie lub zniszczenie
- Nigdy nie stawiać i nie pozwalać dziecku stawać na podnóżku oraz siedzisku wózka. Może to powodować przewrócenie się wózka
- Nie zostawiać wózka w pobliżu ognisk ciepła: grzejników, kuchenek, chronić przed działaniem światła słonecznego
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na powłoce daszka. Może to powodować uszkodzenie jego powłoki lub stelaża i stanowi zagrożenie zdrowia użytkownika

ELEMENTY SKŁADOWE WÓZKA



OŚ TYLNA



PODNOŻEK



KOŁA PRZEDNIE



KOŁA TYLNE



DASZEK



PODUSZKI
BOCZNE



SIEDZISKO TEK-
STYLNE




RAMA I TOR-
BA NA DRO-
BIAZGI POD
SIEDZISKIEM



UWAGA: TA CZĘŚĆ JEST TYLKO ZABEZPIECZENIEM NA
CZAS TRANSPORTU

1. RAMA

Rozłożyć ramę do pozycji pionowej.
Zadziałanie elementu blokującego będzie sygnalizowane kliknięciem

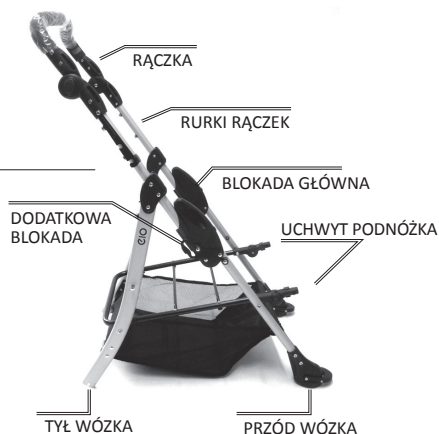

2. OŚ TYLNA

Elementy osi tylnej nałożyć na tylną ramę wózka;
wsunąć uchwyty aż do samoczynnego zablokowania.
Zadziałanie elementu blokującego będzie sygnalizowane kliknięciem



3. KOŁA TYLNE

Podnieść dźwignię hamulca postojowego do góry.
Nie naciskając na koło przycisku blokady koła,
wsunąć lewe koło w lewy uchwyt tylnej osi.
Tak samo uczynić z kołem prawym.
Zadziałanie elementu blokującego będzie sygnalizowane kliknięciem



4. KOŁA PRZEDNIE

Wsunąć lewe koło do otworu w przedniej ramie wózka.
To samo uczynić z kołem prawym. W razie potrzeby nasmarować oś
kola niewielką ilością substancji zawierającej teflon bądź silikon.
Zablokowanie blokady koła w ramie będzie sygnalizowane kliknięciem.
Żeby wymontować koła przednie należy nacisnąć przycisk zwalniający blokadę.
Przycisk znajduje się na plastikowej obudowie przedniej ramy wózka.




5. PODNÓŻEK

Ustawić podnóżek w taki sposób, żeby rurki od podnóżka skierowane były do góry.
Wsunąć podnóżek w uchwyt, dociskając lewą i prawą stronę równomiernie.
Zadziałanie blokady w ramie będzie sygnalizowane kliknięciem



6. SIEDZISKO MATERIAŁOWE

Zamontować siedzisko wózka przy pomocy podwójnych zatrzasków znajdujących się na lewej i prawej ramie uchwytu rączki wózka. Prawidłowe zapięcie siedziska będzie sygnalizowane dźwiękiem zatrzasknięcia.

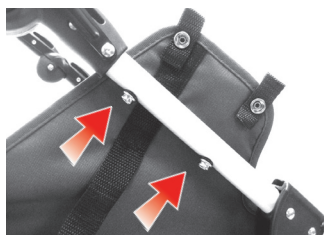

A. SIEDZISKO MATERIAŁOWE

Zamocować siedzisko przy pomocy zatrzasków odpowiednio do obu tylnych części ramy wózka. Prawidłowe zapięcie ramiączek będzie sygnalizowane dźwiękiem zatrzasknięcia



B. DOLNA CZĘŚĆ SIEDZISKA


PRZEDNIE PASKI
(powyżej śruby, poniżej
przegubu podnóżka)

TYLNE PASKI



C. WAŻNE: PRZEDNIE PASKI Z OCZKAMI POD SIEDZISKIEM

Przełożyć pasy siedziska wokół ramy wózka i zapiąć na oczka

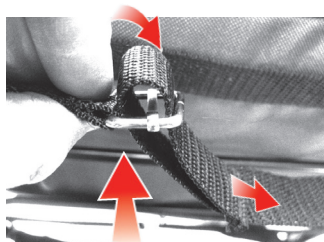

D. TYLNE PASKI Z OCZKAMI POD SIEDZISKIEM

Luźna końcówka paska powinna być założona między pasek siedziska a tapicerkę siedziska. Nie naciągać zbyt mocno.



E. PODNÓŻEK ZATRZASKI

Dolną część tkaniny podnóżka przymocować do rurki podnóżka przy pomocy zatrzasków.
Prawidłowe zapięcie będzie sygnalizowane dźwiękiem zatrzasknięcia




F. RZEPY PRZY MATERIALE PODNÓŻKA

Rzepy tapicerki podnóżka owinąć odpowiednio wokół rurki podnóżka i zamocować




G. BOCZNE KIESZENIE

Zawinąć odpowiednio kieszenie na ramie wózka na wysokości blokad ramy i zamocować przy pomocy rzepów

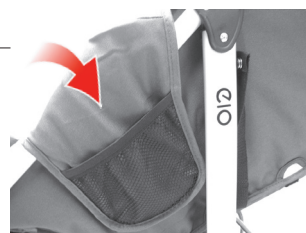


7. DASZEK

- (A) Stelaż daszka wsunąć symetrycznie do gniazd znajdujących się na ramie wózka. Nie używać zbyt dużej siły. Upewnić się, czy między strzelą, a gniazda nie dostał się materiał.
Prawidłowe wplecie potwierdzi dźwięk kliknięcia.
- (B) Aby wypiąć daszek z ramy wózka, nacisnąć przycisk "B" (patrz rysunek) i pociągnąć daszek do góry.

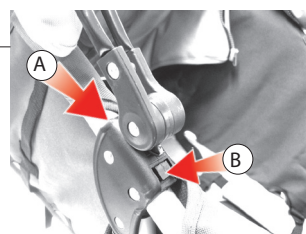


DASZEK: ZATRZASK I ZAMEK BŁYSKAWICZNY

Przełożyć paski zabezpieczające wokół ramy i zapiąć zatrzaski oraz zamki błyskawiczne wokół rurek rączki.
Zamki błyskawiczne oraz zatrzaski powinny być umieszczone na rurce rączki poniżej przycisku regulacji kąta rączki.
W górnej części daszka można odsłonić środkową część daszka.

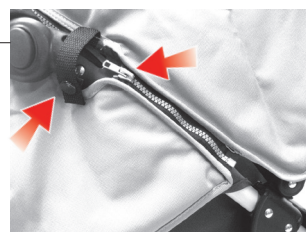

8. PODUSZKI BOCZNE

Przełożyć paski poduszek przez otwory w tapicerce oraz wokół ramy wózka. Wysokość umieszczenia poduszek bocznych dopasować do wymogów dziecka.

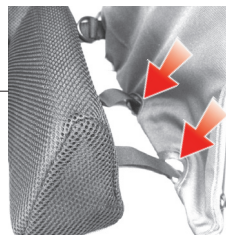

RZEPY BOCZNE

Przeciągnąć rzepy za siedzisko owijając wokół ramy wózka i zamocować





9. PASY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEZENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POWAŻNYCH OBRAŹEN SPOWODOWANYCH WYSUNIĘCIEM. SIĘ LUB WYPADNIĘCIEM DZIECKA Z WÓZKA UŻYWAĆ ZAWSZE PASA KROKOWEGO W POŁACZENIU Z PASEM BIODROWYM I PASEM NA RAMIONA.


9.A REGULACJA WYSOKOŚCI PASÓW PIERSIOWYCH

Rozpiąć klamrę piersiową, następnie przełożyć pasy piersiowe przez niżej znajdujące się pętle oparcia, tak aby dopasować punkt mocowania do wzrostu dziecka. Ponownie zapnij klamrę piersiową.

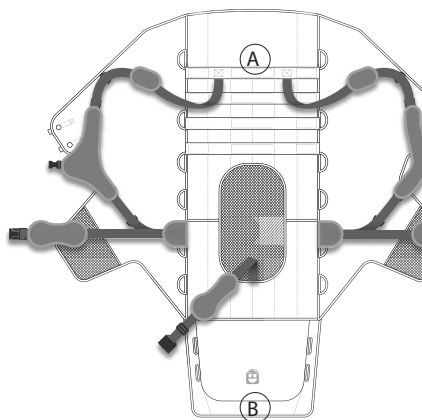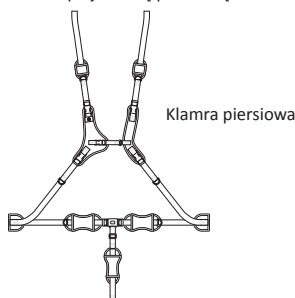

9.B REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA STÓP

Należy przewlec paski przez otwory w tapicerce zlokalizowane w B przestrzeni na stopy oraz dookoła ramy. Następnie należy zapiąć klamrę na tylnej płaszczyźnie oraz naciągnąć paski.

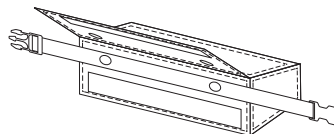

9.B REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA STÓP

Ilustracja przedstawia zamontowane oparcie stóp.

UWAGA: Można dostosować wysokość oparcia stóp.



OPARCIE

11. HAMULEC POSTOJOWY

Podnieść pałąk dźwigni hamulca w celu zwolnienia hamulca.

Aby zablokować hamulec nacisnąć pałąk w dół.



12. POZYCJA PÓŁLEŻĄCA

Do pozycji półleżącej:

Przytrzymać klamrę w ręku i pociągnąć równomiernie paski do siebie.

Do pozycji leżącej:

ścisnąć i wysunąć przyciski znajdujące się na klamrze zgodnie ze strzałką znajdującą się na nich, Przy opuszczaniu oparcia należy przytrzymać je drugą ręką.



13. KĄT PODNÓŻKA

W celu wyregulowania kąta podnóżka:

- aby podnieść podnóżek podciągnąć go do góry chwytając za rurkę, do żądanej pozycji. Podnóżek posiada samoczynną blokadę przed opadaniem. W przypadku opuszczenia podnóżka, nacisnąć przyciski na przegubach podnóżka.

Puścić przyciski przy żądanej pozycji; podnóżek zablokuje się samoczynnie



14. BLOKADA OBROTOWYCH KÓŁ PRZEDNICH

Aby zablokować koła przednie należy nacisnąć dźwignię blokady do dołu, aż do usłyszenia kliknięcia, UWAGA- żeby zablokować przednie koła przed obracaniem się. Muszą one być ustawione jak do jazdy do przodu. Żeby odblokować obracanie się kół podnieść dźwignię blokady do góry.



15. SKŁADANIE WÓZKA

- (A) Rozłożyć wózek do pozycji leżącej
- (B) Odpiąć rzepy tylnej części daszka od siedziska
- (C) Ułożyć raczki w pozycji pionowej
- (D) Odblokować koła przednie i ułożyć je w pozycji poprzecznej.
- (E) Opuścić podnózek.
- (F) Stojąc z tyłu za wózkiem pociągnąć dźwignię blokady głównej i zabezpieczającej.).




SKŁADANIE

- (A) Rozłączyć zamki blokady
- (B) Docisnąć wózek w dół za rączkę do pchania.



SKŁADANIE

- (A) Zabezpieczyć wózek przed rozłożeniem zapinając stosowną blokadę z boku wózka

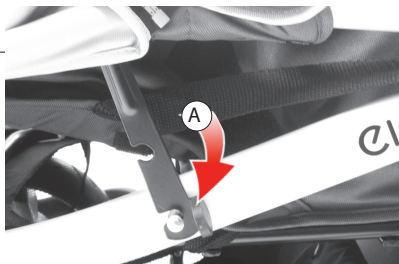

OBŚŁUGA I NAPRAWA

Wózek wymaga regularnej konserwacji przez użytkownika. Regularnie należy sprawdzać wszystkie łączenia i nity oraz elementy zapewniające spójność ramy oraz gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Należy sprawdzić działanie hamulca, kół, opon; w razie potrzeby dokonać naprawy lub wymienić na nowe. Częstej kontroli podlegają wszelkie elementy zatrzasków ramy oraz zamki i elementy tapicerki. Użytkowanie niesprawnego wózka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Nie należy korzystać z niesprawnego sprzętu

- Przegląd wózka zaleca się co 12 miesięcy
- W przypadku wystąpienia skrzypienia, utrudnionego toczenia lub blokowania się kół, elementy montażu kół oraz same koła wyczyścić i nasmarować niewielką ilością substancji zawierających teflon lub silikon. Nie należy korzystać z olejów i smarów, które będą skupiać zanieczyszczenia i powodować dalsze problemy z płynnością jazdy wózka.
- Do naprawy wózka należy wykorzystywać wyłącznie z oryginalne części dostarczone przez producenta. Użycie nieoryginalnych części stanowi zagrożenie dla użytkownika..

CZYSZCZENIE

- Ramę wózka należy czyścić wilgotną ściereczką z detergentem, a następnie osuszyć
- Jeżeli elementy wózka (rama oraz tapicerka) były narażone na działanie soli, należy jeniezwłocznie wyczyścić pod bieżącą wodą
- Daszek, tapicerkę siedziska, poduszkę pod głowę można czyścić lekko wilgotną ściereczką łagodnym detergentem. Elementy tapicerki przed ponownym użyciem należy dokładnie wysuszyć
- Wilgotnych elementów tapicerki nie należy składać i przechowywać w zamkniętych miejscach. Może to powodować powstawanie pleśń

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoim sprzęcie w ramach projektu dalszej modyfikacji i ulepszania produktu

ZALECENIA

WAŻNE:

- przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość
- podczas postoju wózka należy zablokować wózek hamulcem
- bezpieczeństwo twojego dziecka może zostać zagrożone w przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej instrukcji



IMPORTANT- WARRANTY WILL BE VOID IF DEFACED OR REMOVED

UWAGA: Zagubienie karty gwarancyjnej jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych

Producent gwarantuje, że: Wózek jest wolny od wad.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania zgodnego z zapisami zawartymi w instrukcji.

Niniejsza gwarancja obowiązuje pierwszego nabywcę sprzętu i jest ważna z oryginalnym dowodem zakupu.

W przypadku konieczności naprawy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, od którego nabyłeś sprzęt

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU, GDY:

- usterka powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania wózka oraz jego konserwacji
- napraw nie dokonał autoryzowany serwis
- wózek jest uszkodzony w wyniku codziennego użytkowania (standardowego zużycia)
- wózek jest uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji
- podane warunki gwarancji nie zostały spełnione.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:
63200000

PRODUCT DESCRIPTION:
HIO PUSH CHAIR

COUNTRY OF ORIGIN:
CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CARE LTD
ROSENWANGS ALLE 32
82603 WIRRY J
DENMARK
TEL: +45 24 65 55 50
WEB: www.globalcareh2a.com



Date: _____ d.



© 2009 Bergeron By Design

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
Bergeron By Design nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub pominięcia w niniejszym dokumencie.