



Uživatelský manuál

Jogger





VAROVÁNÍ: DEJTE POZOR NA ZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ PÁDEM NEBO VYKLOUZNUTÍM.

NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNĚ.

VŽDY MĚJTE DĚTI V DOHLEDNÉ VZDÁLENOSTI.

DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST.

VŽDY POUŽÍVEJTE FIXACI SEDAČKY.

VŽDY KDYŽ ZASTAVÍTE MUSÍTE POUŽÍT PARKOVACÍ BRZDY.

TENTO KOČÁREK JE VHODNÝ PRO JEDNO DÍTĚ.

DŮLEŽITÉ

- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVÁVEJTE JEJICH PRO BUDOUCÍ REFERENCE.
- BEZPEČNOST DĚTÍ MŮŽE BÝT OHROŽENÁ POKUD NEDODRŽÍTE TYTO POKYNY.
- PŘI PARKOVÁNÍ KOČÁRKU POUŽIJTE BRZDU

VŠEOBECNÉ INFORMACE A BEZPEČNOST

- Přední kolo musí být zaaretováno při běhání.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Nesprávné použití způsobí poškození kočárku.
- Tento produkt byl navržen tak, aby pojal maximální hmotnost 40 kg.
- Děti by měly být vždy zafixovány popruhy a nikdy by neměly být ponechány bez dozoru.
- DŮLEŽITÉ - Pro bezpečnost vašeho dítěte je důležité, aby byl postroj správně namontován a nastaven. Pokud nebude správně nastaven, v souladu s pokyny, bude stabilita kočárku narušena.
- Postroj a bezpečnostní pás nenahrazují řádný dozor dospělých.
- Během nastavování by se dítě nemělo pohybovat.
- DŮLEŽITÉ - NEBEZPEČÍ: Je důležité věnovat pozornost tomu, aby se děti při skládání nebo rozkládání držely mimo dosah kočárku. Během těchto operací je možnost velkého úrazu sevržením.
- V tomto kočárku ani na něm nepřenášejte další děti, zboží ani příslušenství, s výjimkou případů povolených v této příručce. Mohou způsobit, že se kočárek stane nestabilním. Tato manipulace by mohla vést k rozbití kočárku.
- Přetížení, nesprávné skládání a použití příslušenství, např. dětské sedačky, háčky na tašky, pokrývky deště, kočárky apod., jiné než ty, které doporučil dodavatel, mohou tento kočár poškodit nebo rozbit.
- Na škody způsobené použitím příslušenství nedodaného dodavatelem se nevztahují podmínky naší záruky.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku při stoupání nebo klesání po schodech nebo eskalátorech nebo při cestování v jiných dopravních prostředcích.
- Kočárek by se měl vždy snadno otevírat a skládat. Pokud to nejde, nepoužívejte sílu. Možná bude nutné tyto pokyny znovu přečíst.
- Opatrně vyjždějte obrubníky a drsnou zem. Opakovaný náraz způsobí poškození kočárku.
- Nikdy nedovolte dětem stát na opěrce nohou.
- Nenechávejte kočárek vystavený teplu, tj. radiátorem nebo na přímém slunci.

Části



PŘEDNÍ KOLO



ZADNÍ KOLO



RÁM



BOUDIČKA



SEDAČKA

1. RÁM

Vybalte kočárek z krabice a odložte kola stranou.

Vytlačte nožní desku kočárku z rukojeti zatlačením zakřivené příčky nahoru a ven.

Jakmile je rám kočárku zcela rozložen, uslyšíte zvukové kliknutí.

Otočte kolečko do vzpřímené polohy.

Připněte spodní pásek kolem rámu k zajištění sedadla.



2. PŘEDNÍ KOLA

Chcete-li nainstalovat přední kolo, položte kočárek na jeho zadní část, aby se rukojeť a zadní nápravy dotýkaly podlahy.

Zajistěte bezpečnostní zámek na obou stranách vidlice. Před každým použitím zkontrolujte.

POZNÁMKA: Bezpečnostní zámek na obou stranách vidlice.



Tlačítko jemného nastavení přední brzd.



- (A) Vložte přední kolo do hrotů vidlice.
- (B) Utáhněte je otočením páky kola a zajištěním druhé strany.
- (C) Zavřete páku kola a ujistěte se, že je v jedné rovině s trubicí vidlice. Dbejte na to, abyste se neutáhli páku moc silně!



2A. PŘIPOJENÍ PŘEDNÍHO KOLA

In-line zamykací mechanismus je umístěn za vidlicí otáčením předního kola.

Zatažením a otočením knoflíku zamknete a odemknete. Obrázek ukazuje odemčené kolo.



Obrázek nyní zobrazuje kolečko zaaretované. Pro odemknutí zatáhněte a otočte mechanismus.



3. ZADNÍ KOLA


Při instalaci jemně zasuňte nápravu zadního kola do díry na kole, až uslyšíte cvaknutí.

Pro vyjmutí jednoduše zatlačte tlačítko pružinové pojistky a současně vytáhněte kolo.




3A. PARKOVACÍ BRZDA ZADNÍHO KOLA

Postup zabrzdění parkovací brzdy:
- Zatlačte na nožní lištu.

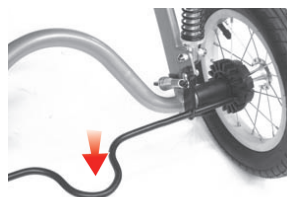


Odbrždění kočárku:
- Vytáhněte na nožní tyč.

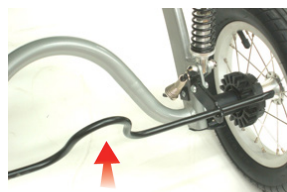

4. BEZPEČNOSTNÍ FIXACE

Nastavení fixace:

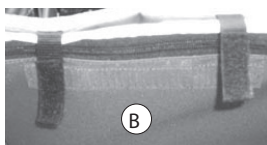

- (A) Odepněte háčky.
- (B) Odstraňte podšívku (přípevněno pomocí suchého zipu).



Vytáhní popruhy z podšívky.

- (A) Pomocí poutek na opěradle sedadla nastavte ramenní popruhy do požadované výšky.
- (B) Posunutím plastového vodítka nahoru a dolů upravte délku popruhu. Po dokončení montáže znovu sestavte podšívku.

- (A) Připněte přezku na ramenní popruh k postroji na hrudi.

Chcete-li upravit délku středního popruhu, posuňte plastové vodítko nahoru a dolů.

5. SKLÁPĚCÍ SEDAČKA


Jednoduše upravte délku sklopného popruhu na požadovaný stupeň sklopení.

Odepněte přezku pro maximální sklopení.





6. ODSTRANĚNÍ SEDAČKY

Pomocí šroubováku s křížovou hlavou odšroubujte sedačku z rámu.

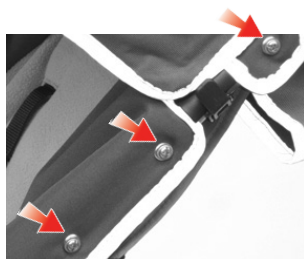

Zrušte upevnění na obou stranách kočárku.
Odejměte popruh sedadla z rámu.

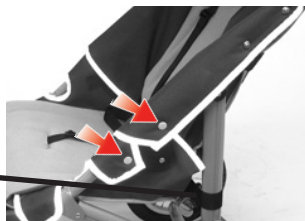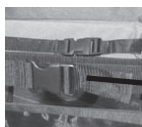

Odepněte suchý zip a připevněte D kroužek pod podnožkou.

POZNÁMKA: PŘED MYTÍM ODSTRÁŇTE VŠECHNY PEVNÉ ČÁSTI


Kočárky jsou dodávány s předmontovaným sedadlem.
Pokyny k montáži / demontáži jsou uvedeny, pokud jsou některé součásti před montáží odstraněny kvůli čištění nebo výměně, další informace najdete na straně 12.



7. NÁKUPNÍ KOŠÍK

Zajistěte přední část koše opásáním kolem spodní příčky pro nohy.

Detail přední části nákupního košíku.

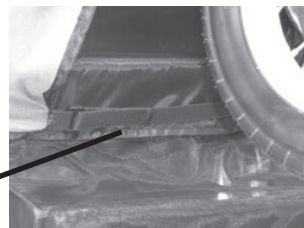

Omotejte zadní popruhy kolem koše kolem rámu a protáhněte zpět D-kroužkem. Zajistěte popruh na suchý zip.

POZNÁMKA: Smyčky D-kroužků jsou v zadní části koše.



8. BOUDIČKA

Připevněte boudičku k části horního rámu, která není pokryta látkou. Malé otvory v trubkách rámu slouží k instalaci boudičky. Ujistěte se, že mezi sponou a rámem nejsou žádné překážky (textilie nebo brzdové čáry). Na mechanismu boudičky je malá plastová sponka, která zapadá do otvoru v rámu.



Zavěste drát na zadní stranu mechanismu boudičky a poté páku zavřete zatlačením do rámu. **NEPOUŽÍVEJTE SÍLU!** Překontrolujte překážky a ujistěte se, že je vsuvka vložena do rámu.



9. NASTAVENÍ MADLA

Odblokujte páku na obou stranách rukojeti. Upravte výšku. Pak zamkněte.

Upravte výšku rukojeti a poté ji znovu zajistěte.



10. SKLÁDÁNÍ


Stiskněte mechanismus umístěný pod rukojetí.
(Mechanismus umístěný na obou stranách)



Sklopte kočárek k sobě.



Zajistěte kočárek ve složené poloze pomocí sklopného popruhu.

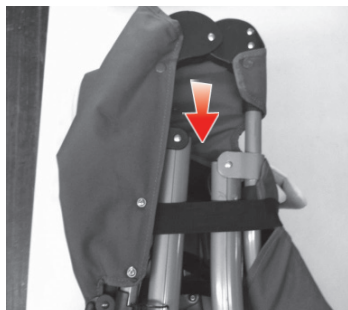

11. BEZPEČNOSTNÍ POPRUH

Ujistěte se, že bezpečnostní pásek je správně upevněn kolem zápěstí, kdykoli je vaše dítě v kočárku.



12. OPTIONAL ACCESSORIES: SEAT AND BACK LINER LINER


Using the provided straps with the Seat & Back Liners, feed the straps through the slots in Jogger seat & back.



Place the Back Liner Straps into the slot at the height where you want the laterals will provide support.



The Seat Liner Straps will go through the lowest slots.

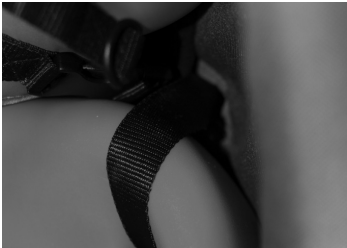

Clip the straps for both the Seat & Back Liners to each other on the back side of the jogger and tighten until secure.

NOTE: The Jogger Chest Harness should lay over the top of the Back Liner for correct positioning. The Jogger 3-Point lap belt can be fed through the 3 holes of the Seat Liner for optional positioning.



13. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: OPĚRKA HLAVY

Použijte popruh dodávaný s volitelnou opěrkou hlavy k jeho připevnění.



Protáhněte popruhy otvoru v sedačce.



Připněte popruhy k sobě na zadní straně a pevně je utáhněte.



OMEZENÁ ZÁRUKA

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Special Tomato® product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within two years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge.

V případě potřeby opravy kontaktujte prodejce, od kterého byl produkt zakoupen.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from the dealer the Special Tomato® product was purchased from. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem

ÚDRŽBA A OPRAVA

Tento kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu uživatelem. Pravidelně kontrolujte těsnost a bezpečnost všech nýtů a přípojecích zařízení. Zkontrolujte všechny brzdy, kola a pneumatiky a v případě potřeby je vyměňte nebo opravte. Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení, zejména primární a sekundární zámky. Měly by se volně pohybovat. Nikdy nepoužívejte produkt, který je rozbity.

- Doporučujeme dělat údržbu každých 12 měsíců.
- Pokud jsou kola vrzající, promažte je mírně teflonovým nebo silikonovým nátěrem. NEPOUŽÍVEJTE produkty na bázi oleje nebo mastnoty, protože by to přitahovalo nečistoty, které znemožní pohyb.
- Používejte pouze náhradní díly od dodavatele.

ČIŠTĚNÍ

- Rám očistěte navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem a důkladně osušte.
- Pokud byly části podvozku kočárku vystaveny slané vodě, doporučujeme je co nejdříve opláchnout čerstvou (tekoucí) vodou.
- Přístřešek možná jemně houbou navlhčil hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Potah sedadla, polštář hlavy, boční polštářky a polštářky postroje mohou být umyty v pračce na 30 stupňů.
- Před opětovným použitím řádně osušte.
- Produkt neukládejte ani neskladujte za mokra a nikdy jej neukládejte ve vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k tvorbě plísní.

Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny designu jakéhokoli ze svých produktů v rámci svého programu neustálého zlepšování designu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte přímo svého prodejce - Petr Junek REHABIFLEXX.

- Autorizovaným dodavatelem kočárku JOGGER je společnost: Petr Junek - REHABIFLEXX, IČ: 76163695
- Telefon: +420 773 033 101.
- E-mail: použijte formulář na www.rehabiflexx.com.
- Lékařský kočárek JOGGER je nesterilní zdravotnické zařízení třídy I pro osoby se zdravotním postižením s problémy s pohyblivostí.

OZNÁMENÍ

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo přeložena do jiného jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky bez souhlasu dodavatele.

Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem - Petr Junek REHABIFLEXX. Speciální díly nejsou zaměnitelné s produkty jiných výrobců. Opotřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

Your stroller is guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of 2 years from the date of purchase under normal use and provided it is used in compliance with the operating instructions. This warranty extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase. Please retain proof of purchase with this Limited Warranty.

Should a repair be needed please contact the retailer from whom the product was purchased.

PLEASE NOTE THAT THE WARRANTY WILL NOT BE APPLICABLE IF:

- A fault is the cause of misuse or poor maintenance.
- Repairs are carried out by a third party.
- The stroller is faulty due to general wear and tear which is the result of everyday use.
- A stroller is damaged as a result of an accident.
- The manufacturer is not satisfied that the stated warranty terms and conditions have been met.

IMPORTANT- WARRANTY WILL BE VOID IF DEFACED OR REMOVED



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CAREHAB
Holmstrupgaardvej 11
8220 Brabrand
Denmark
Tel: +45 24 65 55 50
Web: www.globalcarehab.com



Date:

Id:

Tento NÁVOD K OBSLUZE byl vydán 1. 6. 2019.

Dodavatel si vyhrazuje právo změn z důvodů
technického vývoje produktu a příslušenství.

Petr Junek - REHABIFLEXX, Winklerova
1668/2, 107 00 Praha 10, Dubeč, Česká
republika, +420 773 033 101. Všechna práva
vyhrazena.



© 2009 Bergeron By Design

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Bergeron By Design shall not be liable for technical errors or omissions herein.