



Lietotāja rokasgrāmata

Jogger





BRĪDINĀJUMS:

IZVAIRIETIES NO NOPIETNIEM IEVAINOJUMIEM NOKRĪTOT VAI IZSLĪDOT.

NEKAD NEATSTĀJIET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS.

VIENMĒR PATURIET BĒRNU REDZES LOKĀ.

SVARĪGI: UZGLABIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI ATSAUCEI.

BĒRNA DROŠĪBA IR JŪSU ATBILDĪBA.

VIENMĒR IZMANTOJIET SĒDEKĻA SIKSNAS.

VIENMĒR PĀRLIECINIETIES AKTIVIZĒT STĀVBREMZES, KAD APSTĀJIETIES.

ŠIS TRANSPORTLĪDZEKLIS IR PIEMĒROTS VIENAM BĒRNAM.

SVARĪGI

- PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI.
- JŪSU BĒRNU DROŠĪBU VAR TIKT IETEKMĒTA, JA JŪS NEIEVĒROJAT ŠOS NORĀDĪJUMUS.
- AKTIVIZĒJIET STĀVBREMZI, STĀVOT AR JOGGER.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA UN DROŠĪBA

- Priekšējais ritenis vienmēr jāuztur kārtībā.
- Rūpīgi izpildiet visus norādījumus. Nepareiza lietošana var sabojāt ratiņkrēslu.
- Šis produkts ir izstrādāts maksimālam lietotāja svaram līdz 50 kg (110lbs)
- Bērni vienmēr ir jāpiesprādzē un nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- SVARĪGI: Jūsu bērna drošībai ir svarīgi, lai stiprinājumu jostas būtu pareizi piestiprinātas un noregulētas. Ja tās netiks pareizi noregulētas saskaņā ar instrukcijām, tiks traucēta Jogger stabilitāte.
- Siksnas un drošības josta neaizstāj pareizu pieaugušo uzraudzību.
- Veicot regulēšanu, bērnam jābūt brīvam no kustīgām daļām.
- SVARĪGI - BĪSTAMI: Ir svarīgi rūpēties par to, lai bērni nebūtu tiešā tuvumā, saliekot vai atlokot ratiņus. Šo darbību laikā nav iespējams izvairīties no saspiešanas punktiem un šķērveida darbībām.
- Šajā ratiņkrēslā vai uz tā nedrīkst nēsāt papildu bērnus, preces vai piederumus, izņemot gadījumus, kas atļauti šajā rokasgrāmatā. Tie var izraisīt, ka Jogger kļūst nestabils vai rada nevajadzīgu stresu Jogger, kas var izraisīt lūzumu.
- Pārslodze, nepareiza salocīšana un piederumu, piemēram, bērnu sēdekļu, somu āķu, lietus pārvalku, papildu atbalsta dēļu utt. izmantošana, izņemot ražotāja apstiprinātos, var sabojāt vai salauzt šo Jogger.
- Uz visiem bojājumiem, kas radušies, lietojot piederumus, kurus nav piegādājis ražotājs, neattiecas mūsu garantijas noteikumi.
- Nekad neatstājiet bērnu ratiņos, kāpjot vai nokāpjot pa kāpnēm vai eskalatoriem, kā arī ceļojot ar citiem transporta veidiem.
- Joggeram vienmēr vajadzētu viegli atvērties un salocīties. Nespiediet to. Var būt nepieciešams atkārtoti izlasīt instrukcijas.
- Uzmanīgi brauciet uz apmalēm un nelīdzenām virsmām. Atkārtota trieciena rezultātā var tikt sabojāts ratiņkrēsls.
- Nekad neļaujiet bērniem stāvēt uz kāju balsta.
- Neatstājiet Jogger karstuma iedarbībā, t.i., pie radiatora vai tiešā saules gaismā.
- Nenovietojiet priekšmetus jumtiņa augšpusē, jo tas var sabojāt jumtiņu.

DAĻAS



PRIEKŠĒJĀIS RITENIS



AIZMUGURĒJIE RITENI



RĀMIS



JUMTIŅŠ



SĒDVIRSMAS AUDUMS

1. RĀMIS

Ņemiet Jogger no kastes un novietojiet riteņus malā.

Pabīdiet Jogger pēdu plāksni prom no roktura, nospiežot izliekto šķērssieni uz augšu un uz āru.

Kad Jogger rāmis ir pilnībā atlocīts, būs dzirdams klikšķis.

Pagrieziet Joggeru vertikālā stāvoklī.

Apstipriniet apakšējo jostu ap rāmi, lai nostiprinātu sēdekļa audumu.



2. PRIEKŠĒJAIS RITENIS

Lai uzstādītu priekšējo riteni, novietojiet Jogger uz tā aizmugures, lai rokturis un aizmugurējās ass pieskartos grīdai.

Dakšas abās pusēs uzlieciet drošības slēdzeni. Pārbaudiet pirms katras lietošanas reizes.

PIEZĪME. Drošības fiksators dakšas abās pusēs



Priekšējā bremžu smalkās regulēšanas poga.



- (A) Ievietojiet priekšējo riteni dakšu uzgaļos, izlīdzinot ass plaknes ar dakšu gala plakanajām virsmām.
- (B) Pievelciet, pagriežot riteņa sviru un nostiprinot otru pusi.
- (C) Aizveriet riteņa sviru, pārliecinoties, ka tā ir vienā līmenī ar cauruli. Pārliecinieties, ka nepārvelkat pārāk stipri.



2A. PRIEKŠĒJĀ RITEŅA BLOKĒŠANA

In-line blokēšanas mehānisms atrodas aiz priekšējā riteņa stiprinājuma.

Pavelciet un pagriežiet pogu pa 45°, lai bloķētu un atbloķētu. Attēlā redzams atbloķēts.



Tagad attēlā redzams, ka ritenis ir bloķēts vienā līnijā. Lai atbloķētu, velciet un pagriežiet mehānismu.



3. AIZMUGURĒJIE RITEŅI

Lai uzstādītu, viegli iebīdīet aizmugurējā riteņa asi caurulē, kas atbalsta ass atveri, līdz dzirdat, ka tas noklikšķina uz vietas.




Lai noņemtu, vienkārši nospiediet atsperes bloķēšanas cilni, vienlaikus velkot uz riteņa.



3. AIZMUGURĒJO RITEŅU STĀVBREMZE

Lai iedarbinātu stāvbremzi: Nospiediet uz leju kājas Bremžu stieni

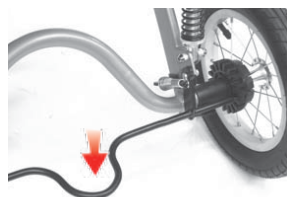


Atbrīvojiet bremzi: Pavelciet uz augšu uz kājas Bremžu stieni.



4. DROŠĪBAS JOSTAS

Drošības jostas pielāgošana:

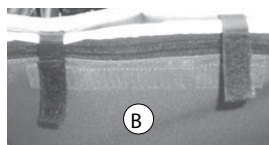

- (A) Atvienojiet āķus.
- (B) Noņemiet flīsa poksterējumu (Velcro cilnes parādītas iepriekš).



Atvienojiet drošības jostas no flīsa polsterējuma



- (A) Pielāgojiet plecu siksnas vēlamajā augstumā, izmantojot cilpas sēdekļa atzveltnē.
- (B) Pabīdiet plastmasas vadotni uz augšu un uz leju, lai pielāgotu siksnas garumu.

Kad montāža ir pabeigta, samontējiet flīsa oderi.

- (A) Piesprādzējiet plecu siksnas sprādzi pie krūšu siksnas

Lai pielāgotu centra siksnas garumu, pārvietojiet plastmasas vadotni uz augšu un uz leju.

Papildu instrukcijas skatiet video ceļvedī

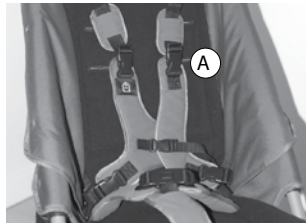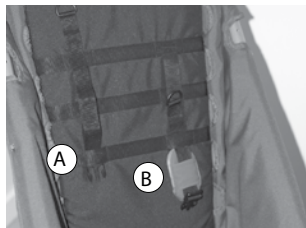

5. MUGURAS ATBALSTA ATGĀŠANA


Vienkārši noregulējiet atzveltnes siksnas garumu vēlamajam slīpuma pakāpei.

Atbrīvojiet sprādzi, lai panāktu maksimālu atgāšanu.





6. SĒDVIRSMAS AUDUMA NOŅĒMŠANA

Izmantojot skrūvgriezi ar phillips galvu, atskrūvējiet apvalku no rāmja.

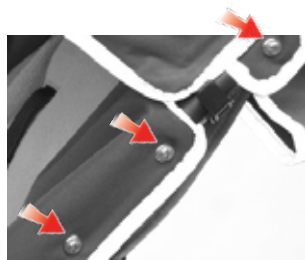

Atbrīvojiet stiprinājumus abās pusēs.

Atbloķējiet sēdekļa siksnu no rāmja, sprādze ir sastiprināta aiz Jogger muguras atbalsta.

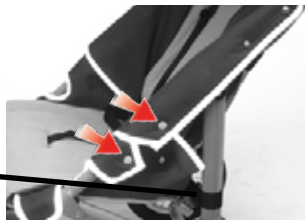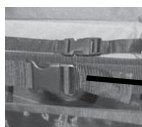

Atvienojiet Velcro siksnu caur D gredzenu, zem kājas aķas.

PIEZĪME: PIRMS MAZGĀŠANAS NOŅĒMT VISAS CIETĀS DAĻAS

Jogger tiek piegādāti ar iepriekš samontētu sēdekli.





Montāžas / noņemšanas instrukcijas tiek sniegtas, ja tīrīšanai vai nomainīai tiek noņemti

7. IEPIRKUMU GROZS

Nostipriniet priekšējā groza atloku, nofiksējot ap apakšējo pēdu atbalsta šķērssiiju.

Sīkāka informācija par priekšējā iepirkumu groza uzmavām

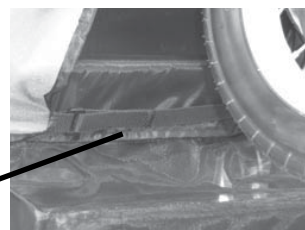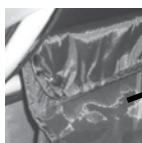

Aptiniet aizmugurējās groza siksnas ap rāmi un izveriet atpakaļ caur D gredzenu. Nostipriniet velcro siksnu.

PIEZĪME. D veida gredzenu cilpas atrodas groza aizmugurē .



8. JUMTIŅŠ

Nostipriniet jumtiņu augšējā rāmja daļā, kuru neaizsedz audums. Ratu rāmja caurulē ir nelieli caurumi jumta fiksācijai. Pārļiecinieties, ka starp nojumes saspraudi un rāmi NAV šķēršļu (auduma vai bremžu līnijas). Uz nojumes mehānisma ir neliels plastmasas nipelis, kas iekļaujas rāmja atverē.



Piekabiniet vadu nojumes mehānisma aizmugurē un pēc tam aizveriet sviru, piespiežot to pie rāmja. NEIZMANTOJIET PĀRLIEKU SPĒKU! Vēlreiz pārbaudiet, vai nav šķēršļu (audums vai pārrāvuma līnija / pārļiecinieties, ka nipelis ir ievietota rāmī).



9. ROKTURA AUGSTUMS

Atslēdziet sviru abās roktura pusēs.
Pielāgojiet augstumu. Pēc tam atkārtoti bloķējiet.

Noregulējiet roktura augstumu, pēc tam noķeksējiet to vēlreiz.



10. SALOCĪŠANA

Saspiediet mehānismu, kas atrodas zem roktura.
(Mehānisms atrodas abās pusēs)



Atlieciet Jogger atpakaļ.



Nostipriniet Jogger salocītā stāvoklī ar fiksācijas siksnu.



11. DROŠĪBAS SIKSNA

Pārbaudiet, ka plaukstas drošības siksnas ir pareizi nostiprinātas ap plaukstas locītavu ikreiz, kad jūsu bērns atrodas Jogger ratos.



12. PAPILDAPRĪKOJUMS: SĒDEKĻA UN ATZVELTNES IELIKTNIS

Izmantojot sēdekļa un aizmugures ieliktniem komplektācijā iekļautās siksnas, padodiet siksnas caur Jogger sēdekļa un atzveltnes spraugām.



levietojiet aizmugures ieliktna siksnas spraugā tādā augstumā, kur vēlaties, lai sāni sniegtu atbalstu.



Sēdekļu ieliktna siksnas iet cauri zemākajām vietām



Piesprādzējiet abu sēdekļa un aizmugures ieliktnu (Seat & Back Liner) siksnas Jogger aizmugurējā pusē un pievelciet, līdz tās ir nostiprinātas.

PIEZĪME. Lai pareizi novietotu, Jogger krūškurvja drošības jostām jāatrodas virs aizmugures ieliktna augšdaļas. Jogger trīspunktu klēpja jostu var izvadīt caur sēdekļu apšuvuma 3 caurumiem, lai to varētu novietot pēc izvēles.



13. PAPILDAPRĪKOJUMS: GALVAS BALSTS

Izmantojiet siksnu, kas ir komplektā ar papildu galvas balstu, lai piestiprinātu to pie Jogger ratiem.



Izvelciet siksnas caur Jogger spraugām.



Piesprādzējiet siksnas Jogger aizmugurē un pievelciet, lai to nostiprinātu.



GARANTĪJA

Bergeron by Design garantē produkta Special Tomato® sākotnējam mazumtirdzniecības pircējam, ka, ja divu gadu laikā pēc pirkuma datuma kāda detaļai vai sastāvdaļai nebūs ražošanas defekti vai izgatavošanas trūkumi. Bojātās detaļa tiks salabotas vai nomainītas (pēc Bergeron dizaina ieskatiem) bez maksas. Garantijas apkalpošanu var veikt pilnvarots servisa centrs vai (pēc Bergeron dizaina ieskatiem) rūpnīca.

Šī garantija neattiecas uz normālu nodilumu vai bojājumiem, kas radušies negadījuma vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Lai izmantotu šo ierobežoto garantiju, lietotājam vispirms jāiegūst atgriešanās autorizācijas numurs no izplatītāja, pie kura tika iegādāts Special Tomato® produkts. Produkts, kā arī rēķina oriģināla kopija, Atgriešanās autorizācijas numurs un rakstisks problēmas apraksts ir jāpiegādā rūpnīcas vai pilnvarota servisa centram uz paša lietotāja rēķina.

APKOPE UN REMONTS

Šiem ratiņiem nepieciešama regulāra apkope. Regulāri pārbaudiet visu kniedes, skrūvju un savienotājerīču stingrību un drošību. Pārbaudiet visas bremzes, riteņus un riepas un, ja nepieciešams, nomainiet vai salabojiet. Pārbaudiet visu drošības ierīču pareizu darbību, jo īpaši primārās un sekundārās slēdzenes. Šīm detaļām vienmēr jābūt brīvām pārvietošanās iespējām. Nekad neturpiniet lietot izstrādājumu, kas nav strukturāli drošs.

- Mēs iesakām apkalpot ik pēc 12 mēnešiem.
- Ja riteņi čīkst, ieeļļojiet ar teflona vai silikona smērvielu. **NELIETOJĪET** produktus, kuru pamatā ir eļļa vai tauki, jo tas piesaistīs netīrumus, kas aizsprostos kustību.
- Jāizmanto tikai ražotāja rezerves daļas. Var būt nedroši izmantot detaļas, kuras nav piegādājis ražotājs.

TĪRĪŠANA

- Notīriet rāmi ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli un kārtīgi nosusiniet.
- Ja ratiņu šasijas daļas ir bijušas pakļautas sālsūdenim, iesakām tās pēc iespējas ātrāk noskalot ar svaigu (krāna) ūdeni.
- Jumtiņu var tīrīt izmantojot mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Sēdekļa pārvalks, galvas spilvens, sānu spilventiņi un jostu spilventiņi var būt mazgāti. Pirms atkārtotas izmantošanas rūpīgi izžāvējiet.
- Nesalociet un neglabājiet produktu mitrā stāvoklī un nekad neglabājiet mitrā vidē. Tas var izraisīt pelējuma veidošanos.

Ražotājs patur tiesības veikt dizaina izmaiņas jebkurai savam produktam kā daļu no nepārtrauktas dizaina uzlabošanas programmas.

KLIENTU SERVISS

Sazinieties tieši ar izplatītāju. Vai arī sazinieties ar Eiropas pilnvaroto pārstāvi.

PIEZĪME

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst nekopēt, reproducēt, pārsūtīt, pārrakstīt, glabāt izguves sistēmā vai tulkot citā valodā vai datorvalodā jebkādā formā vai jebkādā veidā, elektroniski, mehāniski, magnētiski, optiski, ķīmiski, manuāli vai citādi. citādi bez iepriekšējas rakstiskas Bergeron by Design piekrišanas.

Īpašajiem Tomato® izstrādājumiem izmantojiet tikai īpašos Tomato® piederumus un detaļas. Īpašās Tomato® daļas nav aizstājamas ar citu ražotāju produktiem. Drošības labad nekavējoties nomainiet visas nolietotās detaļas. © Bergeron pēc dizaina.

Jūsu ratiņiem ir 2 gadu garantija pret ražošanas defektiem no to iegādes dienas, ja tie tiek lietoti saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Šī garantija attiecas tikai uz sākotnējo mazumtirgotāju un ir spēkā tikai tad, ja tā tiek piegādāta ar pirkuma apliecinājumu. Lūdzu, saglabāiet pirkuma apliecinājumu ar šo ierobežoto garantiju.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura produkts tika iegādāts.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA GARANTIJA NETIKS PIEMĒROT, JA:

- Problēma ir nepareizas izmantošanas vai sliktas apkopes cēlonis.
- Remontu veic trešā persona.
- Ratiņi ir bojāti, pateicoties vispārējai nodilumam, kas ir ikdienas lietošanas rezultāts.
- Ratiņi ir bojāti negadījuma rezultātā.
- Ražotājs nav pārliecināts, ka norādītie garantijas noteikumi ir izpildīti.

SVARĪGI - GARANTIJA TIKS ANULĒTA, JA TIKS MAINĪTA vai NOŅEMTA



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CAREHAB
Holmstrupgaardvej 11
8220 Brabrand
Denmark
Tel: +45 24 65 55 50
Web: www.globalcarehab.com

Date:

Id:



© 2009 Bergeron By Design

Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Bergeron By Design neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām vai informācijas izlaidumiem.