


Sitter Harness

SITZGURT GEWINDE & ANSCHLÜSSE

Gurtdiagramm

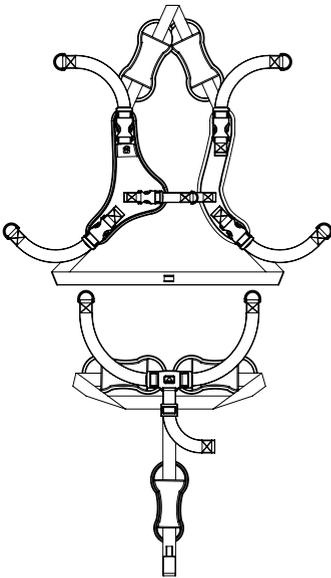

Gurt installiert



BRUSTGURTE
5-PUNKT-GURT

3-PUNKT-GURT
TAILLEN- & SCHRITT-
GURTE

BEFESTIGUNGSGURT
ZUR BEFESTIGUNG AN
EINEM STUHL, USW.



MONTAGE BECKENGURT



Schritt 1
Schrittgurt nach oben durch die unterseite des unteren zentralen schlitzes



Schritt 2
Rechter hüftgurt nach oben durch den rechten schlitze



Schritt 3
Linker hüftgurt nach oben durch den linken schlitze



Schritt 4
Clip knicken

MONTAGE BRUSTGURT



Schritt 1
Lösen sie den clip des rechten brustgurts und führen sie den gurt durch den linken schulter Schlitz



Schritt 2
Fädeln sie die gurte um den rücken und aus dem rechten schulter Schlitz



Schritt 3
Lassen sie den clip in die oberseite des rechten brustgurtes einrasten



Schritt 4
Entriegeln sie den rechten seitlichen gurt und führen sie den gurt in den linken hüft Schlitz



Schritt 5
Fädeln sie die gurte unter der schlingen im schritt hindurch nach oben und in den rechten schlitz



Schritt 6
Befestigen sie den brustclip erneut an der unterseite der rechten seite des brustgurtes

ATTACHMENT STRAP INSTALLATION



Schritt 1
Fädeln sie den gurt unten durch den linken hüft Schlitz



Schritt 2
Fädeln sie den gurt unter dem sitz über der schlaufe nach oben zum rechten hüft Schlitz



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329
PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**



GLOBAL CARE AD
ROSENWANGS ALLE 32
81263 MIHY J
DENMARK
TEL +45 29 69 55 50
WEB www.globalcaread.com



© 2009 Bergeron By Design

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Bergeron By Design haftet nicht für technische Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.