


Sitter Harness

COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DEL ARNÉS

Intalación del arnés

Esquema del arnés

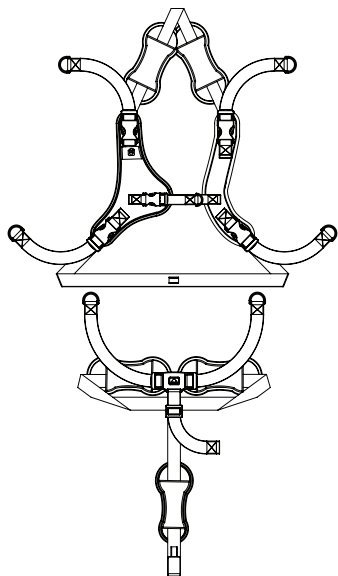

Correas torácicas
Arnés de 5 puntos

Arnés pélvico de 3 puntos
Cincha pélvica y perineal

Colocación de las correas,
como ajustar a la silla, etc.



INSTALACIÓN DEL ARNÉS PÉLVICO



PASO 1
Introducir la cincha perineal
hacia arriba a través de la
ranura central inferior.



PASO 2
Introducir la cincha pélvica
derecha, hacia arriba, a
través de ranura derecha.



PASO 3
Introducir la cincha pélvica
izquierda, hacia arriba, a
través de ranura izquierda.



PASO 4
Fijar el clip.

COLOCACIÓN DEL ARNÉS TORÁCICO



PASO 1
Soltar la correa derecha y deslizarla a través de la ranura izquierda.




PASO 2
Colocar la correa alrededor del respaldo e introducirla por la ranura derecha.



PASO 3
Enganchar el clip de la parte superior derecha del arnés torácico.



PASO 4
Soltar la correa derecha y pasarla través de la ranura izquierda de la cintura.

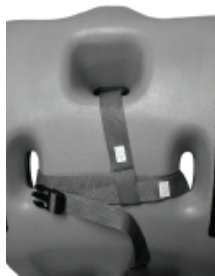

PASO 5
Colocar la correa a través del enganche perineal hacia arriba y sacar por la ranura derecha.



PASO 6
Vuelva a colocar el clip derecho de la parte inferior enganchado en el arnés torácico.



PASO 1
Colocar la correa por debajo a través de la ranura izquierda de la cintura.



PASO 2
Pasar la correa por debajo del asiento e introducir hacia arriba por la ranura derecha de la cintura.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329
PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CARE AD
ROSENWANGS ALLE 32
81263 MIYU J
DENMARK
TEL +45 24 66 55 50
WEB www.globalcaread.com



**fiveyear
warranty**

© 2009 Bergeron By Design

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Bergeron By Design no será responsable de los errores técnicos u omisiones de este documento.