

Untergestell für Sitter Sitz

MOBILER ODER NICHTMOBILER HOLZ UNTERGESTELL

NÜTZLICHE



Großer Kreuzschlitzschraubendreher



Schraubenschlüssel

Es wird die mobile Option gezeigt



ROLLEN & HALTERUNGEN




BEFESTIGUNGSTEILE

- Teile
- 8 Bolzenschrauben
 - 8 Kontermuttern


NICHTMOBILES HARDWARE-KIT

- Teile
- 4 Gleiter
 - 4 Sicherungsscheiben
 - 4 Muttern

GRÖSSE 1,2,3

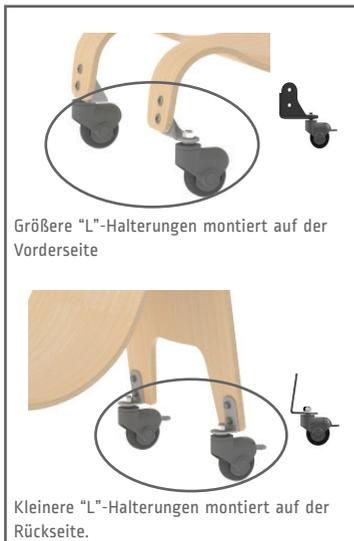

GRÖSSE 4,5

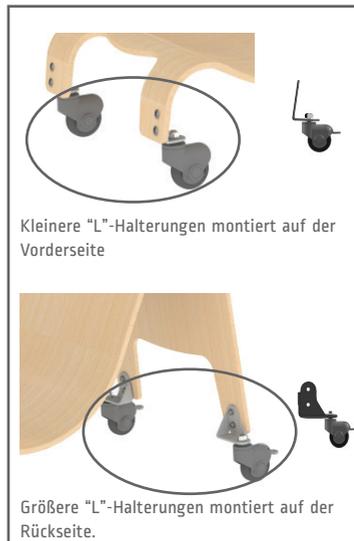


MONTAGE: ALLE HALTERUNGEN X4




Beachten Sie, dass Lenkrollen, dass Lenkrollen mit Bremse an der Rückseite der Basis montiert werden. Dies erhöht die Stärke der Basis. Bitte achten Sie auf festsitzende Schrauben.

NICHTMOBIL NUR X4

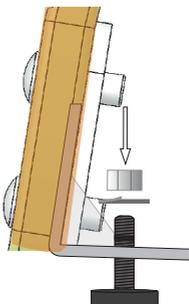

Führen Sie den nichtmobilen Gleiter durch die Basishalterung nach oben. Montieren Sie Unterlegscheiben dann die Mutter. Hinweis: Bitte achten Sie auf festsitzende Schrauben.

MOTAGE: ROLLEN X 4

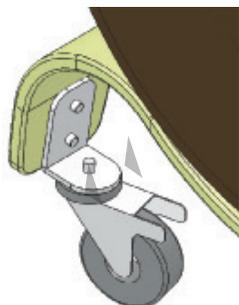

Achten Sie darauf, dass die Rollen mit Bremse auf der Rückseite des Basis installiert sind. Dies erhöht die Basisstärke. Bitte achten Sie auf festsitzende Schrauben



MANUFACTURED BY
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE**

GLOBAL CAREHAB
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK

TELEPHONE: +45 24 65 55 50
WEB SITE: www.glojalcarehab.com

DATE OF MANUFACTURE:



fiveyear
warranty

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

© 2009 Bergeron By Design

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Bergeron By Design haftet nicht für technische Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.