

Soft Touch Sitter Base

BASE DE MADERA ESTÁTICA O MÓVIL

HERRAMIENTAS ÚTILES



Destornillador Phillips largo



Llave inglesa

Opciones de bases



RUEDAS Y SOPORTES




SOPORTE

- Partes
- 8 tornillos
 - 8 tacos de madera


KIT SOPORTE ESTÁTICO

- Partes
- 4 ligaduras/sujecciones
 - 4 Arandelas de seguridad
 - 4 tuercas

TALLA DE 1,2,3

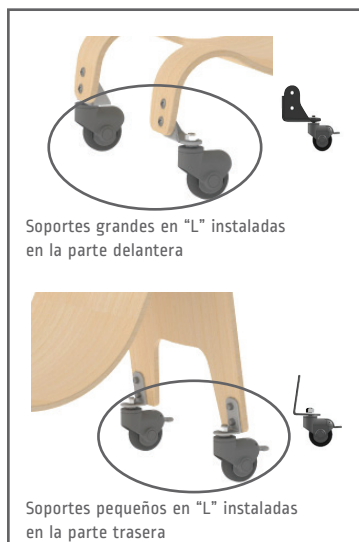

TALLA DE 4,5

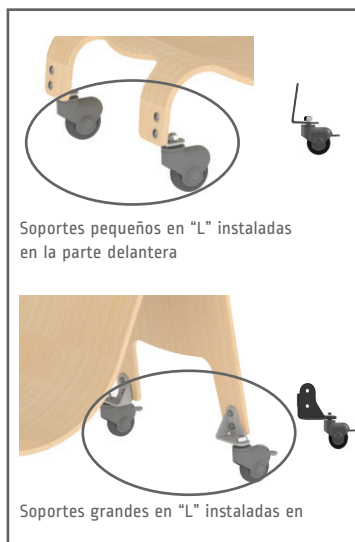


INSTALAR: TODOS LOS SOPORTES



Soporte de cierre metálico x4 para la base de madera.


Nota: mantener los tornillos apretados.

TACOS NO MÓVILES X4

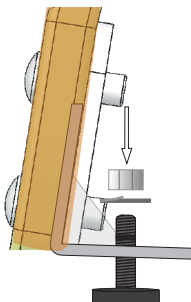

Colocar el taco no móvil en el soporte de la base. Instalar la arandela de seguridad y luego la tuerca. Nota: Mantener apretadas las tuercas.

INSTALAR: RUEDAS X4

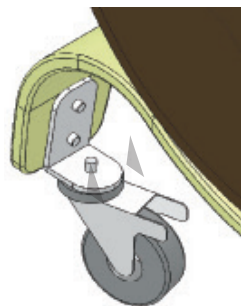

Estar seguro de que las ruedas y los frenos se instalan hacia la parte trasera de la base. Esto aumenta la fuerza de la base. Mantener los tornillos apretados.



MANUFACTURED BY
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE**

GLOBAL CAREHAB
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK

TELEPHONE: +45 24 65 55 50
WEB SITE: www.globalcarehab.com

DATE OF MANUFACTURE:



fiveyear
warranty

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

© 2009 Bergeron By Design

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Bergeron bt Designs no será responsable de los errores técnicos u omisiones de este documento.