



# Manual de usuario

# Sitter Seat

---





## ATENCIÓN:

PARA EVITAR GRAVES LESIONES POR CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS USE SIEMPRE EL ARNÉS DE SEGURIDAD.

NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. MANTENGA AL NIÑO SIEMPRE A LA VISTA.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

LA SEGURIDAD DEL NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.

USE SIEMPRE EL ARNÉS DEL ASIENTO.

ASEGURE LAS CORREAS FIRMEMENTE.

DEBE ASEGURARSE SIEMPRE DE QUE LAS RUEDAS ESTÁN BLOQUEADAS CUANDO NO SEA NECESARIO MOVER LA BASE MÓVIL DEL ASIENTO.

PARA PREVENIR GRAVES LESIONES O LA MUERTE – NO LO USE EN VEHICULOS DE MOTOR.

## PARTES

- 1 asiento con la correa de fijación
- 1 cincha torácica
- 1 cincha perineal
- 1 cincha pélvica
- 1 correa de fijación secundaria

Correas de fijación universales



## 5 maneras de usar su asiento Special Tomato®

\*Use las correas universales para asegurar el asiento en las aplicaciones que se describen debajo



En una silla



En una base estática



En una base móvil




En la cuña



En sillas de paseo

## COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DEL ARNÉS

Esquema del arnés

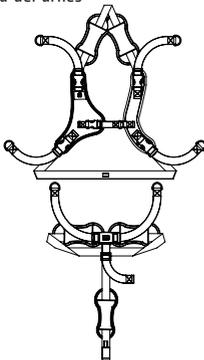

Intalación del arnés



Correas torácicas  
Arnés de 5 puntos

Arnés pélvica de 3 puntos  
Cincha pélvica y perineal

Colocación de las correas,  
como ajustar a la silla, etc.



## INSTALACIÓN DEL ARNÉS PÉLVICO



PASO 1 Introducir la cincha perineal hacia arriba a través de la ranura central inferior.



PASO 2 Introducir la cincha pélvica derecha, hacia arriba, a través de ranura derecha.



PASO 3 Introducir la cincha pélvica izquierda, hacia arriba, a través de ranura izquierda.



PASO 4 Fijar el clip.

## COLOCACIÓN DEL ARNÉS TORÁCICO



PASO 1 Soltar la correa derecha y deslizarla a través de la ranura izquierda.




PASO 2 Colocar la correa alrededor del respaldo e introducirla por la ranura derecha.



PASO 3 Enganchar el clip de la parte superior derecha del arnés torácico.



PASO 4 Soltar la correa derecha y pasarla a través de la ranura izquierda de la cintura.

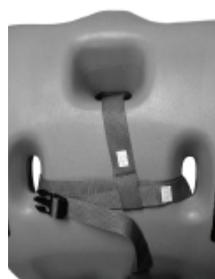

PASO 5 Colocar la correa a través del enganche perineal hacia arriba y sacar por la ranura derecha.



PASO 6 Vuelva a colocar el clip derecho de la parte inferior enganchado en el arnés torácico.



PASO 1 Colocar la correa por debajo a través de la ranura izquierda de la cintura.




PASO 2 Pasar la correa por debajo del asiento e introducir hacia arriba por la ranura derecha de la cintura.




## COLOCACIÓN DE LAS CORREAS DE FIJACIÓN

## COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS CORREAS


Fijar a una silla

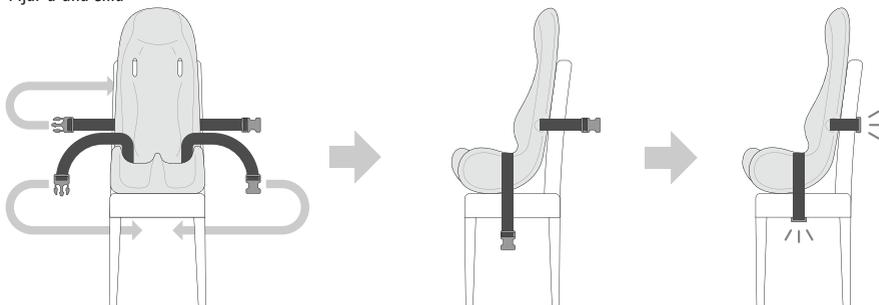


Fijar a la base de madera Special Tomato®

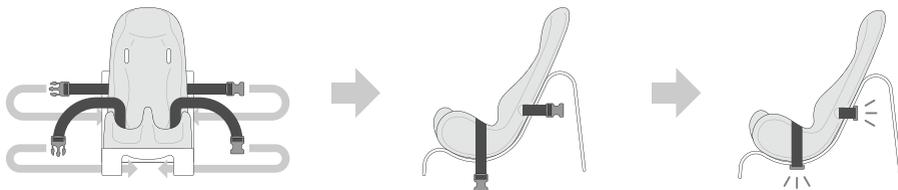

Fijar a la cuña Special Tomato®

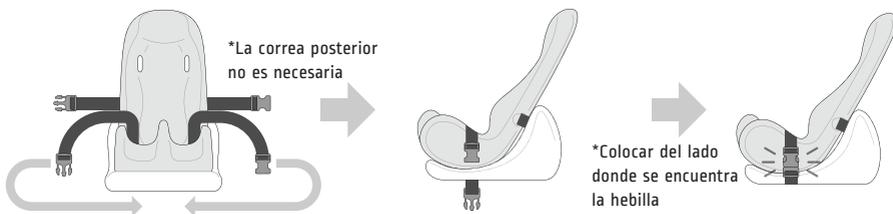

Fijar a la sillas EIO, Jogger Special Tomato® o a una silla

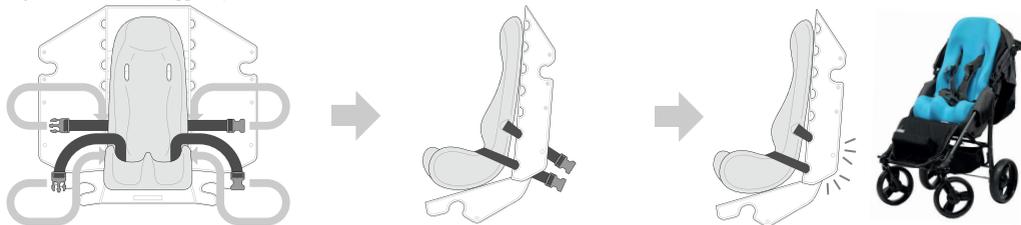

Instalación

## COLOCACIÓN DEL ARNÉS DEL ASIENTO

### Técnicas de ajuste apropiado



Usar los protectores de hombros para evitar que el niño se roce el cuello y la cara con las hebillas de plástico.

Asegurar la colocación adecuada del arnés torácico, la correa del pecho debe quedar en la parte media del tórax [altura del pezón].

El arnés pélvico tiene un bloqueo que impide que las correas se aflojen y mantener así un posicionamiento adecuado de la pelvis.

El cinturón pélvico tiene un botón de liberación rápida que abre los dos lados del arnés pélvico para un rápido y fácil acceso al niño..

Ajustar la longitud de la cincha perineal para permitir que el cinturón pélvico se coloque sobre la pelvis. Esto evitará que la correa pélvica se sitúe en el abdomen inferior.



El cinturón pélvico tiene una cerradura para mantenerlo a la longitud deseada. Para ajustarlo al crecimiento, empuje hacia arriba de las cinchas para liberar el bloqueo.

## BASCULACIÓN 25°

Todas las bases se puede inclinar hasta 25 °



PASO 1  
Soltar las correas de fijación.

PASO 2  
Ajustar al ángulo deseado.

PASO 3  
Coloque el clip de agarre para asegurar las correas

## **GARANTÍA LIMITADA**

Special Tomato garantiza al comprador del producto original asiento Soft-Touch, que si cualquier parte o componente presenta defectos en materiales o mano de obra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de compra, la parte en cuestión será reparada o reemplazada [ a discreción de Tomato ] de forma gratuita. El servicio de garantía puede ser realizado por un centro de servicio autorizado o por la discreción de Tomato.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, daños causados por accidente o mal uso.

Para ejercer esta garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización de Bergeron by Design. El producto debe ser entregado con portes pagados ( UPS recomendado ) a la fábrica o a un centro de servicio autorizado, junto con una copia de la factura original, el número de autorización y una descripción por escrito del problema.

## **CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO**

Los productos Special Tomato® son impermeables a los fluidos pero no los sumerja. Use un detergente suave para limpiar la silla periódicamente.

Para prolongar la vida de las tiras, limpie la parte del enganche para eliminar la pelusa y otras partículas.

## **CUIDADOS DEL ARNÉS**

Coloque el arnés en una bolsa de malla durante el lavado a máquina con agua fría, luego secar al aire.

## **SERVICIO AL CLIENTE**

Póngase en contacto directamente con su distribuidor. O contacte con el representante autorizado en Europa.

## **AVISO**

Use solo los accesorios y las partes correspondientes a los productos de Special Tomato. Los accesorios no son intercambiables con los productos de otros fabricantes. Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato por seguridad.

