



Handleiding Sitter Seat





WAARSCHUWING:

VOORKOM [ERNSTIG] LETSEL EN UITGLIJDEN

LAAT EEN KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ALLEEN, HOUD HET KIND TE ALLEN TIJDE IN ZICHT.

BELANGRIJK: BEWAAR DEZE INFORMATIE.

DE VEILIGHEID VAN HET KIND IS UW VERANTWOORDELIJKHEID.

GEbruik ALTIJD DE STOELFIXATIE.

BEVESTIG DE RIEMEN STEVIG.

VERGREND DE ZWENKWIELEN WANNEER U RIJDT.

WANNEER U STILSTAAT.

DE SITTER MOBIELE BASIS VOORKOM ERNSTIGE EN/OF DODELIJKE ONGEVALLen.

NIET TE GEBRUIKEN IN AUTO'S!

ONDERDELEN

- 1 Sitter met gemonteerde bevestigings (zij)riemen
- 1 borstfixatie
- 1 zitbroek
- 1 heupfixatie
- 1 tweede bevestigingsriem

Bevestigingsriemen



5 manieren om uw Special Tomato®Sitter te gebruiken

Gebruik de bevestigingsriemen om de Sitter in een van deze mogelijkheden vast te maken.



Op een stoel



Vaste basis



Mobiele basis




Vloer Sitter



In wandelwagens

DE SITTER FIXATIE VERZORGEN & VERBINDEN

Fixatiediagram

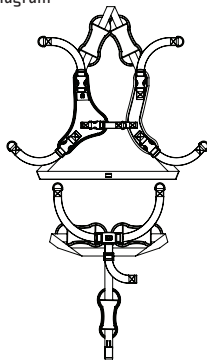

Installatie fixatie



Borstriemen
5-puntsfixatie

3-punts bekkenfixatie
Taille & kruisriemen

Bevestigingsriemen om
o.a. aan een stoel te
bevestigen.



INSTALLEREN VAN DE BEKKENFIXATIE



Stap 1
Kruis de riemen door de bodem centrale gleuf



Stap 2
Bevestig de rechter taillieriem door de rechter gleuf



Stap 3
Bevestig de linker taillieriem door de linker gleuf



Stap 4
Vastklikken

INSTALLEREN VAN DE FIXATIE



Stap 1
Ontkoppel de rechter bors-
trien en steek de riem door
de linker schouder gleuf




Stap 2
Draai de riemen rond de
rug en door de gleuf van de
rechtergleuf.



Stap 3
Klik boven op de
rechterschouder van de
borstfixatie



Stap 4
Ontsluit de rechter laterale
riem en schuif deze door
het linker tailleslot

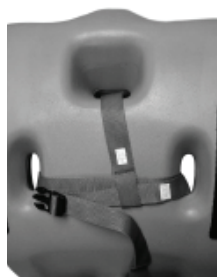

Stap 5
Draai de riemen onder
het kruis door en in-uit
rechterslot



Stap 6
Herbevestig de borstklem
onderaan de rechterzijde
van het borstfixatie.



Stap 1
Draai de riem naar beneden
en door het linker tailleslot




Stap 2
Draai de riem onder de Sitter
en bevestig de lus boven aan
het rechter tailleslot


INSTRUCTIE OM DE RIEM TE BEVESTIGEN

INSTALLEREN VAN DE BEVESTIGINGSRIEMEN


Bevestig aan de stoel

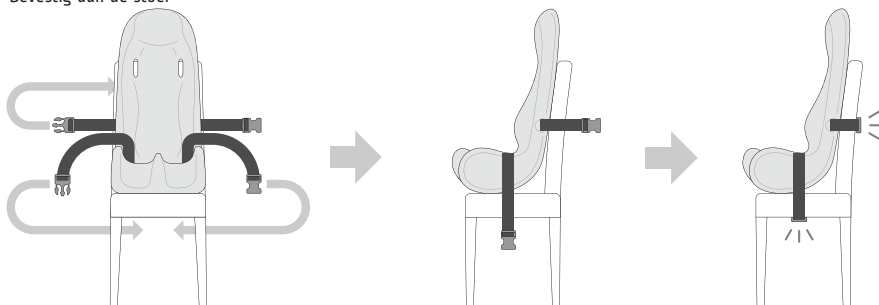


Bevestig het aan een Special Tomato® houten basis

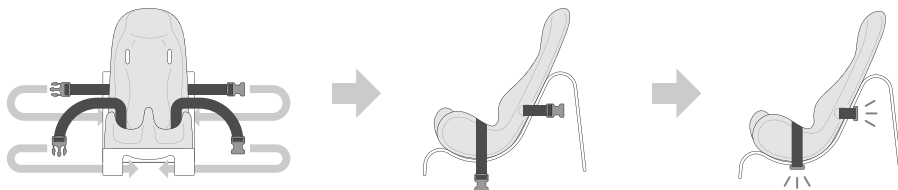

Bevestig het aan een Special Tomato® vloer basis

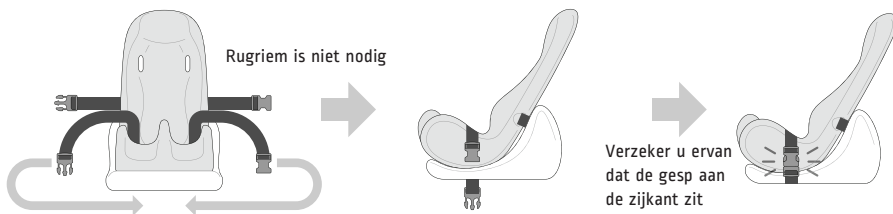

Bevestig het aan een Special Tomato® jogger, eio of rolstoel

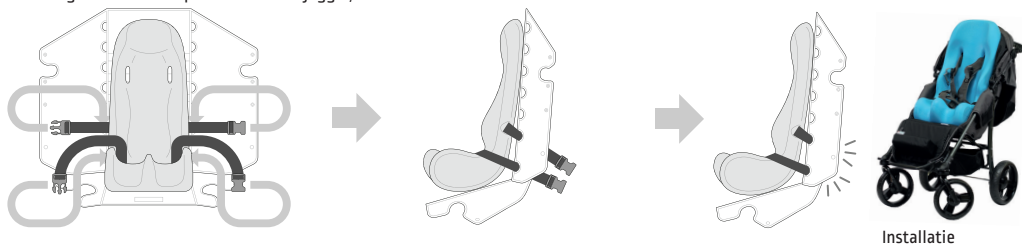

MONTEREN VAN DE SITTER FIXATIE

De juiste technische handelingen



Gebruik de schouderbescherming om de nek en het gezicht van uw kind te beschermen tegen het schuren van de

Om er zeker van te zijn dat de borstfixatie goed wordt bevestigd, zorg ervoor de de borstriem over het midden van de borst wordt geplaatst (navel niveau)

Het bekkenfixatie heeft een nokkenslot om te voorkomen dat het bekkenharna los gaat zitten, en zorgt er zo voor dat het bekken in de juiste positie komt.

Het bekkenfixatie heeft een handige en snelle ontkoppelingssknop aan beide zijden van het bekkenfixatie zodat u snel en handig bij uw kind kunt komen.

Stel de lengte van de kruisriem zo af dat de bekkenriem over het bekken ligt. Dit voorkomt dat de bekkenriem over de onderbuik komt te liggen



De bekkenriem heeft een nokkenslot om het op de juiste lengte te kunnen houden, om aan te kunnen passen. Druk het naar boven om het te ontkoppelen

25° TILPOSITIE

Alle bases kunnen tillen tot 25°



Stap 1
Ontsluit de bevestigingsriemen

Stap 2
Bevestig het in de gewenste hoek

Stap 3
Bevestig de riemen voor de veiligheid

GELIMITEERDE GARANTIE

Bergeron by Design garandeert voor de originele aankoop van dit product van de Special Tomato®, wanneer en (onder)deel een defect vertoont of wanneer het handwerk binnen vijf jaar na aanschaf kapot gaat, dan zal het betreffende (onder)deel op kosten van Bergeron by Design's, vervangen c.q. gerepareerd worden. Garantie-onderhoud zal uitgevoerd worden door een service-bedrijf of in de Bergeron by Design's fabriek.

De garantie vervalt bij normaal gebruik, scheurtjes, of schade veroorzaakt door een ongeluk of bij verkeerd gebruik van het materiaal.

Om een beroep op de garantie te kunnen doen, moet de gebruiker eerst contact opnemen met de dealer van de Special Tomato® waar het desbetreffende product is aangeschaft. Het product moet track and trace op kosten van de klant opgestuurd worden. Inclusief een kopie van de originele factuur. Ook dient er een beschrijving van het probleem bijgevoegd te worden.

ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Special Tomato® Products hoewel bestand tegen vloeistoffen, kunnen niet ondergedompeld worden. Gebruik een mild schoonmaakmiddel om de stoel regelmatig schoon te maken. Om de haken en riemen langer te kunnen gebruiken, borstel de harde stukken schoon om pluiscjes en andere rommeltjes te verwijderen

ONDERHOUD VAN DE FIXATIE

Stop de fixatie in een waszak, was het in koud water in de wasmachine. Niet in de wasdroger laten drogen!

KLANTENSERVICE

Neem direct contact op met uw dealer of de Europese geautoriseerde contactpersoon.

ATTENTIE

Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, vertaald worden in een andere taal, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op enigerlei andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergeron by Design.

Gebruik uitsluitend Special Tomato® accessoires en onderdelen voor de Special Tomato® producten. Special Tomato® onderdelen zijn niet geschikt/verwisselbaar met andere merken. Vervang onmiddellijk, voor de veiligheid, versleten onderdelen. © Bergeron By Design



Belangrijk! Bij beschadiging en/of verwijderen van onderdelen vervalt de garantie.

Uw Sitter Seat dient gegarandeerd minimaal 5 jaar, vanaf de datum van aankoop, zonder problemen gebruikt te kunnen worden.

Gebruik zoals in de instructies vermeld staat. Garantie is uitsluitend geldig op vertoon van aankoopbewijs van uw verkoper.

Neem contact op met uw verkoper indien een reparatie gewenst is.

GARANTIE VERVALT BIJ:

- Een defect bij verkeerd gebruik van het product en slecht onderhoud.
- Wanneer reparaties door anderen zijn uitgevoerd.
- Normale slijtage bij normaal gebruik.
- Beschadiging ten gevolge van een ongeluk.
- Fabrieksgarantie vervalt indien de instructies niet zijn opgevolgd.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:
USA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**



GLOBAL CARE LTD
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIRBY J
DENMARK
TEL: +45 24 66 50 50
WEB: www.globalcarenaa.com

Date: _____ d. _____

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

© 2009 Bergeron By Design
 **SPECIAL
TOMATO**

Bovenstaande informatie kan zonder waarschuwing vooraf veranderen.
Bergeron By Design is niet verantwoordelijk voor technische fouten of veranderingen.