



Руководство по эксплуатации EIO Push Chair



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗБЕГАЙТЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ПРИ ПАДЕНИИ ИЛИ ВЫСКАЛЬЗЫВАНИИ

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕНЬ

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА. ЭТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОДНОГО РЕБЕНКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Внимательно следуйте всем инструкциям. Неправильное использование может привести к повреждению коляски.
- Этот продукт был разработан для перевозки максимального веса 90 фунтов (40кг.).
- Дети должны всегда быть пристегнуты фиксирующим ремнем и находиться под присмотром.
- ВАЖНО – для безопасности вашего ребенка важно, чтобы фиксирующий ремень был правильно подобран и отрегулирован. Если его не отрегулировать правильно в соответствии с инструкциями, стабильность коляски будет нарушена.
- Фиксирующий ремень и ремень безопасности не являются заменой надлежащего присмотра со стороны взрослых.
- Ребенок должен понимать о возможном движении элементов коляски при её настройке.
- ВАЖНО – ОПАСНОСТЬ: важно следить за тем, чтобы дети находились подальше от коляски при её складывании или раскладывании. Во время этих операций неизбежны зажимы и ножничные движения.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка, а также товары и аксессуары, за исключением случаев, разрешенных данным руководством.
- Это может способствовать нестабильности коляски или дополнительной нагрузке на неё, что может привести к поломке.
- Перегрузка, неправильное складывание и использование вспомогательного оборудования, такого как детское сиденье, крючки для сумок, дождевик, подножка для второго ребенка, и т. д., отличных от рекомендованных изготовителем, может повредить или сломать коляску.
- Любые повреждения, вызванные использованием принадлежностей, не поставляемых производителем, не подпадают под условия нашей гарантии.
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске при подъеме или спуске с лестницы или эскалатора или при использовании других видов транспорта.
- Коляска должна всегда легко складываться и раскладываться. Не применяйте силу. Возможно, следует перечитать инструкции.
- Осторожно преодолевайте бордюры и пересеченные местности. Повторное воздействие может привести к повреждению коляски.
- Никогда не позволяйте детям стоять на подножках.
- Не оставляйте коляску под воздействием тепла, например, возле батареи или под прямыми солнечными лучами.
- Не кладите предметы на верхнюю часть капота, так как это может привести к повреждению купола

ЧАСТИ КОЛЯСКИ



ЗАДНЯЯ ОСЬ



ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ



ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА



ЗАДНИЕ КОЛЕСА



НАВЕС



БОКОВЫЕ ПОДУШКИ



ТАНЬ СИДЕНЬЯ



РАМА И
КОРЗИНА ДЛЯ
ПОКУПОК



ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ ЧАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО
УПАКОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

1. РАМА

Откройте рамку в вертикальном положении.
Когда будут соединены основной и
дополнительный замок, будет слышен ЩЕЛЧОК.



2. ЗАДНЯЯ ОСЬ

Толкайте задние стойки рамы к задней оси.
Когда включена блокировка, будет слышен щелчок.



3. ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Толкайте заднее колесо с левой стороны к задней оси.
Повторите с правой стороны. Когда включена блокировка,
будет слышен щелчок.



4. ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Толкайте переднее левое колесо вверх к передней стойке рамы.
Повторите с правой стороны.
Экономно смажьте тефлоновым или силиконовым покрытием.
Когда включена блокировка, будет слышен щелчок.




5. ПОДНОЖКА

Направьте подножку вверх.
Одновременно соедините трубки подножки с правой и левой
сторонами с рамой.
Когда включена блокировка, будет слышен щелчок.



6. ТКАНЬ СИДЕНЬЯ

Застегните двойные кнопки на трубке (с правой и левой стороны).
Когда кнопка застегнута, будет слышен щелчок

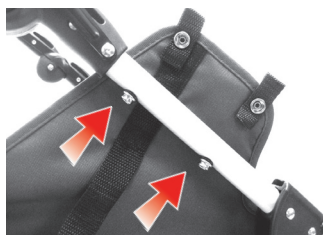

A. ТКАНЬ СИДЕНЬЯ

Пристегните поддерживающие ремни к каждой из задних стоек.
Когда кнопка застегнута, будет слышен щелчок.



В. РЕМНИ ПОД КАРКАСОМ СИДЕНИЯ X2


ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ
(выше болта, ниже
регулировки для ног)

ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ



С. ВАЖНО: КОЛЬЦА РЕМНЕЙ ПОД СИДЕНИЕМ

Протяните снизу, затем через верх.

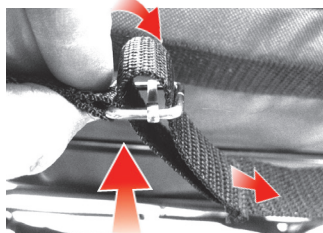

D. КОЛЬЦА РЕМНЕЙ ПОД СИДЕНИЕМ

Свободный конец ремня должен располагаться между
затянутой частью ремня и нижней частью сиденья.
Не перетягивайте.



Е. КНОПКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ Х2

Пристегните ткань к кнопкам.
Когда кнопка застегнута, будет слышен щелчок.




Ф. ЛИПУЧКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ Х2

Оберните липучку вокруг рамки и закрепите.
Повторите с правой стороны.




Г. БОКОВЫЕ ПОДУШКИ

Оберните вокруг основной рамы и закрепите
липучками вниз.
Повторите с правой стороны.

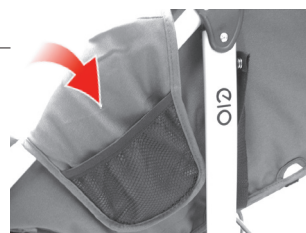

7. НАВЕС


- Ⓐ Плавное направьте зажим навеса в разъем рамы.
Не применяйте силу. Убедитесь, что зажим свободен от ткани.
Повторите с левой стороны. Когда включена блокировка,
будет слышен щелчок.
- Ⓑ Для того, чтобы снять навес нажмите зажим вниз,
затем сдвиньте вверх.

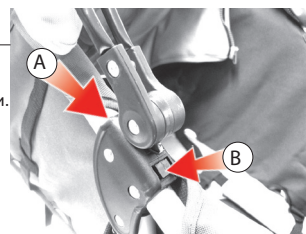

ЗАМКИ И МОЛНИЯ НАВЕСА


Закрепите стабилизационные замки и молнии по бокам.
Молния и замки должны быть расположены чуть ниже
кнопки регулировки ручки. Повторите с левой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете снять заднюю половину купола,
расстегнув по центральному шву

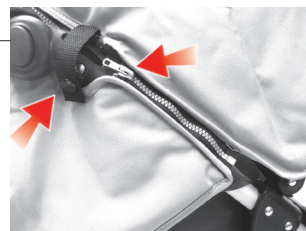

8. МЯГКИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ X4

Проденьте липучки через разъемы, расположенные по краям сиденья и задней поверхности.

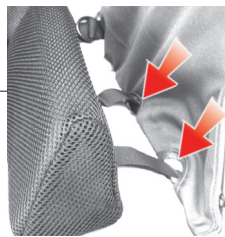

БОКОВЫЕ ЛИПУЧКИ

Протяните липучки наружу через внешнюю (или заднюю) часть сиденья. Затем оберните вокруг рамы и закрепите. Повторите для всех.




9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ/ФИКСИРУЮЩЕГО РЕМНЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ОТ ПАДЕНИЯ ИЛИ ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАХОВЫЙ РЕМЕНЬ В СОЧЕТАНИИ С ПОЯСНЫМ РЕМЕНЕМ И ПЛЕЧЕВЫМИ РЕМНЯМИ

9А. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЛЯМКИ

Отцепить грудную подкладку и просунуть ремни через отверстия в спинке (сиденья) чтоб отрегулировать плечевой ремень узла. Соединить грудную подкладку с зажимом.

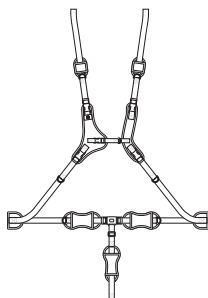


Грудная подкладка с зажимом

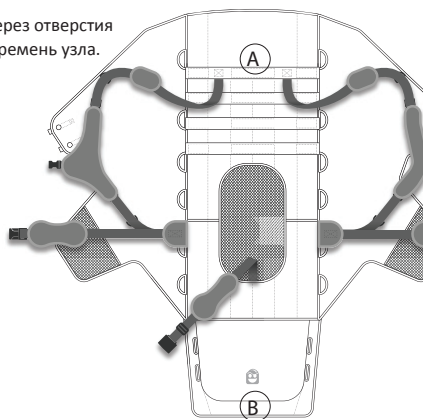

9В. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПЕДАЛЬ

Просунуть ремни через слот обивки для ног и вокруг ножной рамы. Застегнуть застежки в задней стороне и затянуть

См установленный на следующей странице.

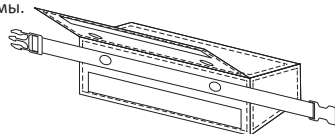

9.В РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПЕДАЛЬ

Педаля показана установленной.

ПРИМЕЧАНИЕ: Педаля может быль отрегулирована выше или ниже. Просунуть ремни с наружной стороны.



11. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Толкните ногой вверх, чтобы выключить и нажмите вниз, чтобы включить.



12. ОТКИДНОЙ РЕМЕНЬ

Вверх: поднимите откидные пряжки и потяните ремень вниз.
Вниз: зажмите кнопку со стрелкой на откидном ремне и потяните вниз.



13. УГОЛ НАКЛОНА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Для регулировки угла наклона подставки для ног, одновременно нажмите кнопку с обеих сторон. Фиксация сработала, когда будет слышен щелчок.



14. ПОВОРОТНЫЕ ЗАМКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Чтобы задействовать поворотные замки передних колес, нажмите петельку вверх, чтобы открыть, и вниз, чтобы задействовать. Повторите с левой стороны. Фиксация сработала, когда будет слышен щелчок. Примечание: для блокировки передние колеса должны быть обращены вперед.



15. СКЛАДЫВАНИЕ

- Ⓐ Полностью откиньте коляску назад
- Ⓑ Отсоедините задний навес капота от спинки сиденья
- Ⓒ Поместите ручки в вертикальном положении
- Ⓓ Разблокируйте передние поворотные колеса (должны быть обращены вперед с обеих сторон)
- Ⓔ Подставка для ног должна быть в нижнем положении
- Ⓕ Стоя за коляской, поднимите вверх к основному замкам (с обеих сторон) и дополнительному замку (справа).




СКЛАДЫВАНИЕ

- Ⓐ Основные замки будут отсоединены
- Ⓑ Надавите на ручку



СКЛАДЫВАНИЕ

- Ⓐ Пристегните к зажиму закрытия

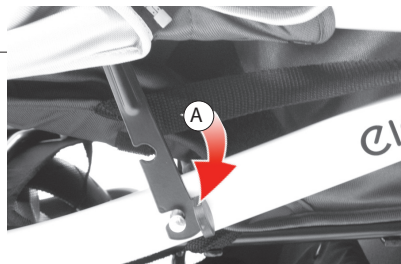

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует оригинальному розничному покупателю изделия «Special Tomato®», что, в случае проявления материального или производственного дефекта какой-либо части изделия в течение 12 месяцев от даты покупки, дефектная часть будет отремонтирована или заменена производителем бесплатно. Гарантийное обслуживание может быть выполнено или в авторизованном сервисном центре или (по решению производителя) на заводе-изготовителе.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ или на повреждения, причиненные в результате происшествий или неправильной эксплуатацией.

Для осуществления данной ограниченной гарантии пользователь должен сперва получить «номер авторизации возврата» (Return Authorization Number) у продавца, у которого было приобретено изделие. Изделие должно быть отправлено с заранее оплаченным возвратом (рекомендуется UPS) на предприятие или в авторизованный сервисный центр в комплекте с копией оригинального чека покупки, номером авторизации возврата и письменным описанием проблемы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ:

Коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя. Регулярно проверяйте прочность крепления и надежность всех заклепок и соединительных устройств. Проверяйте все тормоза, колеса и шины, и при необходимости заменяйте или ремонтируйте. Проверяйте правильность работы всех устройств безопасности, в частности, основной и дополнительный замки. Они всегда должны свободно двигаться. Не используйте продукт, конструкция которого неисправна.

- Мы рекомендуем проводить обслуживание каждые 12 месяцев.
- Если колеса скрипят, немного смажьте их тефлоновой или силиконовой смазкой. Не используйте масла или смазки на основе нефтепродуктов, так как на них будет копиться грязь, затрудняя вращение колес.
- Следует использовать запчасти только от производителя. Использование деталей, не поставляемых производителем, может быть небезопасным

ЧИСТКА:

- Очищайте раму влажной тряпкой и мягким моющим средством, затем тщательно просушите.
- Если шасси коляски подверглось воздействию соленой воды, рекомендуем как можно скорее промыть его пресной (водопроводной) водой.
- Навес можно легко протереть влажной тканью с мягким моющим средством. Покрытия сиденья, подголовник, боковые подушки и фиксирующие подушки можно мыть. Полностью высушите перед повторным использованием.
- Не следует складывать или хранить изделие во влажном виде, а также хранить во влажной среде, это может привести к поражению плесенью.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в дизайн своей продукции, как часть программы по непрерывному улучшению дизайна.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Обращайтесь непосредственно к продавцу.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Никакая часть данного документа не может быть фотокопирована, воспроизведена, передана, транскрибирована, сохранена в системе хранения данных или переведена на другой язык или компьютерный язык, в любой форме или любым способом, электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иначе без предварительного письменного разрешения Bergeron by Design.

Для изделий «Special Tomato®» используйте только оригинальные запасные части и принадлежности. Запчасти «Special Tomato®» не взаимозаменяемы с частями других производителей. В целях безопасности немедленно заменяйте любые износившиеся части.

